

医疗器械召回事件报告表

提交: ■ 企业所在地省级食品药品监督管理部门

■ 器械注册/备案部门

产品名称	无创呼吸机, 呼吸机	注册证或备案凭证编码	国械注进 20163545170, 国械注进 20192082053, 国械注进 20152541271
生产企业名称	伟康股份有限公司 Respironics, Inc		
代理人名称	飞利浦(中国)投资有限公司		
召回单位负责人和联系方式, 经办人和联系方式	负责人: 后文琳, 联系方式: 021-24223802; 经办人: 马悠琴, 联系方式: 021-24223802。		
产品的适用范围	<p>无创呼吸机(注册证编号: 国械注进 20163545170), BiPAP A30 呼吸机用于提供无创通气支持, 以治疗患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)和呼吸功能不全的成年患者以及体重超过 10kg 的儿童患者。它适合在家庭和门诊环境中使用, 比如医院、睡眠实验室和亚急性护理机构。</p> <p>呼吸机(注册证编号: 国械注进 20192082053), 产品用于提供有创和无创通气支持, 以治疗患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)、呼吸功能不全或呼吸衰竭的成年患者以及体重超过 10kg 的儿童患者。本设备供家庭、医疗机构使用, 并可以结合轮椅和轮床等移动设备使用。本设备不可用做转运呼吸机, 也不适用于生命支持。</p> <p>呼吸机(注册证编号: 国械注进 20152541271), 该设备为患有阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)的 7 岁及以上、体</p>		

	重超过 18.2kg 儿童患者及体重超过 30kg 的成人患者提供无创通气。本设备供医院使用。应在专业医生指导下使用。		
涉及地区和国家	全球	召回级别	一级召回
涉及产品生产（或进口中国）批次、数量	共 8,478 台	涉及产品型号、规格	BiPAP A30、BiPAP A40、OmniLab Advanced+
识别信息（如批号）	设备序列号，请见附表。	涉及产品在中国的销售数量	共 8,478 台
召回原因简述	飞利浦伟康收到部分型号无创呼吸机/呼吸机中断和/或失去治疗的投诉，当设备检测到内部错误或可能影响治疗的情况会发生警报，该警报可能导致治疗中断和/或损失，从而导致焦虑、意识模糊/定向障碍、呼吸频率（RR）增加/减少、呼吸困难、心动过速（高心率）、胸壁运动异常、轻度至重度低氧血症/低氧饱和度、高碳酸血症/呼吸性酸中毒、通气不足、呼吸衰竭或最脆弱患者的潜在死亡。		
纠正行动简述（包括召回要求和处理方式等）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 飞利浦将向受影响客户发放主动召回通知书，请客户知晓并注意此问题； 2. 该问题的纠正行动已在主动召回通知书中陈述，请客户注意采取相应措施； 3. 飞利浦伟康目前正在调查此问题，一旦确定适当的措施将立即联系患者。 		

报告单位：

（盖章）

报告人：

马悠琴

负责人： 后文琳

报告日期：2024年 04月 22日



附表：受影响设备序列号信息

共 8,478 台无创呼吸机和呼吸机受到该问题影响，其中：

- 无创呼吸机（注册证编号：国械注进20163545170），型号BiPAP A30，受影响数量为4,433台；
- 呼吸机（注册证编号：国械注进20192082053），型号BiPAP A40，受影响数量为3,877台；
- 呼吸机（注册证编号：国械注进20152541271），型号OmniLab Advanced+，受影响数量为168台。



机型和相应的设备序列号信息请见以下：

无创呼吸机（注册证编号：国械注进 20163545170），型号 BiPAP A30，设备序列号清单如下：

N184661255934	N102984614365	N184661441C6D	N2277165788B4	N270015584389	N27324427D808
N20906529AA42	N1029846271FE	N184661450DE4	N227716587043	N270015595200	N2732442820FF
N211332766D1E	N102984636077	N184661463F7F	N2277165961CA	N27001560E5A9	N273244293176
N21133286EED6	N1029846414C8	N184661472EF6	N22771660D663	N27001561F420	N27324430B56F
N21135785AE6A	N102984650541	N18466148D601	N22883231B430	N27001565B204	N27324431A4E6
N21135828C238	N1029846637DA	N18466149C788	N227341371326	N270015679116	N27324432967D
N2113326011F0	N102984672653	N184661504391	N22771635FF76	N27001571EDF8	N2732443387F4
N2113584239B2	N10298468DEA4	N184661515218	N22771661C7EA	N27001574BA55	N27324434F34B
N222269495727	N10298469CF2D	N184661526083	N22964371BB3E	N27001575ABDC	N27324435E2C2
N22771654BA2F	N102984704B34	N18466153710A	N2296437289A5	N270015807FB9	N27324436D059
N231656588EC4	N102984715ABD	N1846615405B5	N22964373982C	N270015825CAB	N273244383927
N243074614175	N102984726826	N18466155143C	N22964374EC93	N270015834D22	N2732443928AE
N246889313CEC	N1029847379AF	N1846615626A7	N22964375FD1A	N270015852814	N27324440F867
N246889534B2E	N102984740D10	N18466157372E	N22964376CF81	N270015870B06	N27324441E9EE
N27063817218F	N102984751C99	N18466158CFD9	N22964377DE08	N270015906661	N27324442DB75
N270638037E73	N102984762E02	N18466159DE50	N2296437826FF	N2700159354FA	N27324443CAFC
N293729393C3E	N102984773F8B	N1846616069F9	N229643793776	N2700159531CC	N27324444BE43
N100865519E81	N10298478C77C	N184661617870	N22964380297F	N270015960357	N27324445AFCA
N10086554C92C	N10298479D6F5	N184661624AEB	N2296438138F6	N2700159712DE	N273244469D51

N100865580340	N10298480C8FC	N184661635B62	N229643820A6D	N270016041839	N273244478CD8
N1008655912C9	N102985005CE0	N18653374F870	N229643831BE4	N27001608D255	N27324448742F
N10086561B4E9	N102985027FF2	N18653378321C	N229643846F5B	N27001609C3DC	N2732444965A6
N100865628672	N102985036E7B	N186533792395	N229643875DC0	N2700161047C5	N27324450E1BF
N1008656397FB	N102985041AC4	N186533803D9C	N2296439030A7	N27001611564C	N27324451F036
N10086564E344	N1029850639D6	N186533812C15	N2296439213B5	N2700161264D7	N27324452C2AD
N10086565F2CD	N10298507285F	N186533821E8E	N229643947683	N27001613755E	N27324453D324
N100865682928	N10298508D0A8	N18653375E9F9	N229643965591	N27001619DA04	N27324454A79B
N100865792179	N10298509C121	N184661299358	N22964398BCEF	N270016206DAD	N27324455B612
N100865847954	N102985104538	N19823251501A	N2256014702C0	N270016224EBF	N273244568489
N100865865A46	N1029851154B1	N198232526281	N22560148FA37	N270016271912	N273244579500
N10086588B338	N10298512662A	N1982325407B7	N22560149EBBE	N27001628E1E5	N273216163806
N10086589A2B1	N1029851377A3	N19823255163E	N225601517E2E	N27001629F06C	N27321617298F
N1008659026A8	N10298514031C	N1982325624A5	N225601524CB5	N2700163346EE	N27321618D178
N1008659205BA	N102985173187	N19823257352C	N225601535D3C	N2700163523D8	N27321619C0F1
N100865931433	N10298518C970	N19823258CDD8	N225601542983	N270016361143	N273216207758
N100866188B44	N10298519D8F9	N19823259DC52	N22560155380A	N2700163700CA	N2732162166D1
N100866264852	N1030813040A6	N198232606BFB	N225601560A91	N27001638F83D	N27321622544A
N10086628A12C	N1030813263B4	N1982326248E9	N225601571B18	N27001639E9B4	N2732162345C3
N10086629B0A5	N10308133723D	N198232635960	N2256016045CF	N270016465C4B	N27321624317C
N1008663034BC	N103081340682	N198232642DDF	N225601506FA7	N270016474DC2	N2732162520F5
N100866330627	N10308135170B	N198232653C56	N22560158E3EF	N2700165203B7	N27321626126E
N100866347298	N103081373419	N198232660ECD	N22560159F266	N27001657541A	N2732162703E7
N100866356311	N10308138CCEE	N198232671F44	N225601615446	N27001658ACED	N27321628FB10
N10086636518A	N10308139DD67	N19823268E7B3	N2256016266DD	N27001659BD64	N27321629EA99
N100866374003	N103081400DAE	N19823269F63A	N225601637754	N270016600ACD	N273216306E80
N10086638B8F4	N103081411C27	N198232707223	N2256016403EB	N27026554C84C	N273216317F09
N10086639A97D	N103081433F35	N1982327163AA	N225601651262	N27026555D9C5	N27324417F260
N1008664079B4	N103081455A03	N198232725131	N2256016620F9	N27026556EB5E	N273244239E2C
N10086641683D	N103081466898	N1982327340B8	N225601673170	N27026557FAD7	N273244586DF7
N100866425AA6	N103081477911	N198232743407	N22560168C987	N270265580220	N273244597C7E
N100866443F90	N1030814881E6	N19823275258E	N22560169D80E	N2702655913A9	N27324460CBD7
N100866452E19	N103081523764	N198232761715	N225601705C17	N27026560A400	N27324461DA5E
N100866470D0B	N1030815326ED	N19823277069C	N225601714D9E	N27026561B589	N27324462E8C5
N10086648F5FC	N103081545252	N19823278FE6B	N225601727F05	N270265628712	N27324463F94C
N10086649E475	N1030815543DB	N19823279EFE2	N225601736E8C	N27026563969B	N273244648DF3
N10086650606C	N103081567140	N19823281E062	N225601741A33	N27026564E224	N273244659C7A
N1008665171E5	N1030815760C9	N19823282D2F9	N225601750BBA	N27026565F3AD	N27324466AEE1
N1008665352F7	N10308158983E	N19823284B7CF	N225601763921	N27026566C136	N27324467BF68
N100866542648	N1030815989B7	N19823285A646	N2256017728A8	N27026567D0BF	N27324468479F
N1008665537C1	N103081603E1E	N1982328694DD	N22560178D05F	N270265682848	N273244695616

N10086656055A	N103081612F97	N198232887DA3	N22560179C1D6	N2702656939C1	N27324470D20F
N10086658EC24	N103081621D0C	N198232896C2A	N22560180DFDF	N27026570BDD8	N27324471C386
N10086659FDAD	N103081630C85	N19823290E833	N22560181CE56	N27026571AC51	N27324472F11D
N100866615B8D	N10308164783A	N19823292CB21	N22560182FCCD	N270265729ECA	N27324473E094
N100866626916	N1030816569B3	N19823293DAA8	N22560183ED44	N270265738F43	N27324474942B
N10086663789F	N103081665B28	N19823294AE17	N2256018499FB	N27026574FBFC	N2732447585A2
N100866651DA9	N103081674AA1	N19823295BF9E	N225601858872	N27026576D8EE	N27324476B739
N100866662F32	N103907507613	N198232968D05	N22560186BAE9	N27026577C967	N27324477A6B0
N10086668C64C	N1039076728C4	N198232979C8C	N225601885397	N270265783190	N273244785E47
N10086669D7C5	N10298481D975	N19823298647B	N22560189421E	N270265792019	N273244794FCE
N1008667053DC	N10298482EBEE	N1982330065F7	N22560190C607	N270265803E10	N2732448051C7
N100866714255	N10298483FA67	N1982330246E5	N22560191D78E	N270265821D02	N27324481404E
N1008667270CE	N102984848ED8	N19823303576C	N22560192E515	N270265830C8B	N2732448272D5
N100866736147	N10298486ADCA	N1982330423D3	N22560193F49C	N270265847834	N27324483635C
N1008667415F8	N10298487BC43	N19823305325A	N225601948023	N2702658569BD	N2732448417E3
N1008667636EA	N1029848844B4	N19715691F104	N2256019591AA	N270265865B26	N27324485066A
N100866772763	N10298489553D	N19715692C39F	N22560196A331	N270265874AAF	N2732448634F1
N10086678DF94	N10298490D124	N19715693D216	N22560197B2B8	N27026589A3D1	N273244872578
N10086680D014	N10298491C0AD	N19715694A6A9	N225601984A4F	N2702659027C8	N27324488DD8F
N10086681C19D	N10298492F236	N19715695B720	N225601995BC6	N270265913641	N27324489CC06
N10086683E28F	N10298493E3BF	N1971569685BB	N22560202DD69	N2702659204DA	N27324490481F
N100866849630	N102984949700	N197156979432	N231002040CBE	N270265931553	N273244915996
N1008668587B9	N10298496B412	N197156986CC5	N22560187AB60	N2702659461EC	N273244926B0D
N10086687A4AB	N10298497A59B	N198232537308	N22560201EFF2	N270265957065	N273244937A84
N100866894DD5	N102984985D6C	N198232617A72	N22560203CCE0	N2702659642FE	N273244940E3B
N10086690C9CC	N102984994CE5	N19823280F1EB	N231002051D37	N270265975377	N273244951FB2
N10086691D845	N102985206F50	N19823283C370	N22560200FE7B	N27026598AB80	N273244962D29
N10086692EADE	N102985224C42	N198232878554	N2296511365FF	N27026599BA09	N273244973CA0
N10086693FB57	N102985235DCB	N19823291F9BA	N229651141140	N270266001FB4	N27324498C457
N100866948FE8	N102985242974	N1982329975F2	N2296511500C9	N270266010E3D	N27324499D5DE
N100866959E61	N1029852538FD	N19823301747E	N229651163252	N270266023CA6	N27324500C5DB
N10086696ACFA	N102985260A66	N20268455CF05	N2296511723DB	N270266032D2F	N27324501D452
N10086697BD73	N102985271BEF	N20268456FD9E	N22965118DB2C	N270266045990	N27324502E6C9
N100866984584	N10298528E318	N20268457EC17	N22965119CAA5	N270266054819	N27324503F740
N10086699540D	N10298529F291	N2026845814E0	N229651207D0C	N270266076B0B	N2732450483FF
N101173250A80	N102985316701	N202684590569	N229651216C85	N2702660893FC	N273245059276
N10117326381B	N102985334413	N20268460B2C0	N229651225E1E	N270266098275	N27324506A0ED
N101173272992	N102985352125	N2026846291D2	N229651234F97	N27026610066C	N27324507B164
N10117328D165	N1029853613BE	N20268463805B	N229651252AA1	N2702661117E5	N273245084993
N10117329C0EC	N10298538FAC0	N20268454DE8C	N22965126183A	N27026612257E	N27324509581A
N1011733044F5	N102985412A09	N20268465E56D	N2296512709B3	N2702661334F7	N27324510DC03

N1011733402D1	N102985421892	N20268467C67F	N22965128F144	N270266144048	N273479602AFD
N101173351358	N102985447DA4	N202856861269	N22965129E0CD	N2702661551C1	N273479613B74
N1011733621C3	N102985456C2D	N2028568703E0	N2296513064D4	N27026616635A	N2734796209EF
N10117337304A	N102985465EB6	N20285688FB17	N232093491FF9	N2702661772D3	N273479646CD9
N10117339D934	N102985474F3F	N20285689EA9E	N23209352B8F2	N270266188A24	N273479657D50
N1011734009FD	N10298548B7C8	N202856906E87	N23209353A97B	N270266199BAD	N273479664FCB
N101173411874	N10298549A641	N202856917F0E	N23209354DDC4	N270266202C04	N273479675E42
N101173422AEF	N102985502258	N202856924D95	N23209355CC4D	N270266213D8D	N27347968A6B5
N101173455E50	N1029855133D1	N202856935C1C	N23209356FED6	N270266220F16	N27347969B73C
N101173466CCB	N10298552014A	N2028569428A3	N23209357EF5F	N270266231E9F	N273479703325
N1011734885B5	N10298554647C	N20285695392A	N2320935817A8	N270266246A20	N2734797122AC
N1011735101AC	N10298556476E	N202856971A38	N23209360B188	N270266257BA9	N273479721037
N101173523337	N1029855756E7	N20285699F346	N23209361A001	N270266264932	N2734797301BE
N101173545601	N10298558AE10	N20285700E343	N23209362929A	N2702662758BB	N273479747501
N10086552AC1A	N10298559BF99	N20285702C051	N232093638313	N27026628A04C	N273479765613
N10086553BD93	N1039084572A1	N20285704A567	N23209364F7AC	N27026629B1C5	N2732157683B2
N10086555D8A5	N10390859A115	N20285705B4EE	N23209365E625	N2702663035DC	N27321580654C
N10086556EA3E	N103908610735	N202857068675	N23209366D4BE	N270266312455	N273216150A9D
N10086566C056	N102985217ED9	N2028570797FC	N23209367C537	N2702663216CE	N273217741518
N1008656938A1	N102985403B80	N202857086F0B	N232093683DC0	N270266330747	N273217750491
N10086570BCB8	N10298543091B	N20285710FA9B	N232093692C49	N27001413C0E6	N27321776360A
N100865729FAA	N10390838E44C	N20285711EB12	N23209371B9D9	N27001423EA8E	N273217772783
N10086575EB15	N103908512D5D	N20285713C800	N232093728B42	N27001428545D	N27321778DF74
N10086577C807	N102984176B5B	N20285715AD36	N232093739ACB	N270014491104	N27321779CEFD
N1008657830F0	N102985014D69	N202857178E24	N23209374EE74	N27001535CCBC	N27321780D0F4
N100865830DEB	N102985151295	N2028571876D3	N23209375FFFD	N27001555986C	N27321781C17D
N100865874BCF	N10298516200E	N20285719675A	N23209376CD66	N2700159177E8	N27321782F3E6
N100865913721	N1029853430AC	N20285720D0F3	N23209377DCEF	N270016611B44	N27321783E26F
N10086594608C	N10298539EB49	N20285722F3E1	N232093782418	N27026575EA75	N2732178496D0
N100865975217	N1029855310C3	N20285723E268	N232093793591	N270265812F99	N273217858759
N10086598AAE0	N1029855575F5	N20285725875E	N232093802B98	N27026588B258	N27321786B5C2
N10086599BB69	N10308128D536	N20285727A44C	N232093813A11	N270266067A82	N27321787A44B
N100866010F5D	N10308129C4BF	N202857285CBB	N23209382088A	N27001566809F	N273217885CBC
N100866023DC6	N10308131512F	N202857294D32	N232093831903	N2702663473F8	N273217894D35
N100866032C4F	N103081362590	N20285730C92B	N232093846DBC	N27063668846B	N27321790C92C
N1008660458F0	N103081422EBC	N20285732EA39	N229651127476	N2706366995E2	N27321791D8A5
N100866054979	N103081444B8A	N20285733FBB0	N232093857C35	N2706367011FB	N27321792EA3E
N100866067BE2	N10308149906F	N202857348F0F	N232093864EAE	N270636710072	N27321793FBB7
N100866076A6B	N1030815105FF	N202857359E86	N232093509BE0	N2706367232E9	N273217948F08
N10086608929C	N10390759EBD2	N20285736AC1D	N232093590621	N270636732360	N273217959E81
N100866098315	N10390775120E	N20286399EF36	N232184467CF4	N2706367457DF	N27321796AC1A

N10086610070C	N10390777311C	N2028640029EA	N23218448958A	N270636776544	N27321797BD93
N100866111685	N10390866738A	N202864013863	N23218450001A	N2706368183BA	N273217984564
N10086612241E	N103908676203	N202864020AF8	N232184511193	N27063686F705	N2732179954ED
N100866144128	N103908722C76	N202864031B71	N232184522308	N27063694CDCF	N2732180054F3
N10086616623A	N102984044018	N202864046FCE	N232184533281	N27063696EEDD	N27321801457A
N100866199ACD	N102984154849	N202864064CDC	N23218454463E	N270637099BEE	N2732180277E1
N100866202D64	N102984561DB2	N202864075D55	N2321845557B7	N270637123CE5	N273218036668
N100866213CED	N103081501476	N20286408A5A2	N23218456652C	N2706371459D3	N2732180412D7
N100866220E76	N10390842061E	N20286409B42B	N2321845774A5	N270637176B48	N27321805035E
N100866231FFF	N102984346A70	N202864103032	N232184588C52	N270637198236	N2732180631C5
N1008662759DB	N102985307688	N2028641121BB	N232184599DDB	N270637302C47	N27321807204C
N100867037693	N10298532559A	N202864121320	N232184602A72	N270637331EDC	N27321808D8BB
N1008670513A5	N102985370237	N2028641302A9	N232184613BFB	N270637346A63	N27321809C932
N10086706213E	N102984958689	N202864147616	N232184620960	N2706374170C6	N273218104D2B
N1008670730B7	N13500479D6F6	N202864165504	N2321846318E9	N2706374536E2	N273218115CA2
N10086709D9C9	N135005710062	N20286417448D	N232184646C56	N270637525B85	N273218126E39
N100867105DD0	N1350057232F9	N20286418BC7A	N232184657DDF	N27063758F4DF	N273218137FB0
N100867127EC2	N135005732370	N20286419ADF3	N232184664F44	N2706376271ED	N273218140B0F
N100867136F4B	N1350057457CF	N202864201A5A	N232184675ECD	N2706376637C9	N273218151A86
N100867141BF4	N135005754646	N202864210BD3	N23218468A63A	N27063769CF3E	N273243461154
N1008671638E6	N1350057674DD	N2028642328C1	N23218469B7B3	N270637726835	N273243727D18
N10086717296F	N135005776554	N202864245C7E	N2321847033AA	N27063779D6E6	N27324388518A
N1008672077B8	N135005789DA3	N202864254DF7	N232184712223	N27063781D966	N273479756488
N100867216631	N135005798C2A	N202864267F6C	N2321847210B8	N27063792F225	N27347977479A
N1008672254AA	N135005809223	N202864276EE5	N23218474758E	N27063795869A	N27347978BF6D
N100867234523	N1350058183AA	N202864289612	N232184756407	N27063797A588	N27347979AEE4
N10086724319C	N13500582B131	N202864300382	N229651243B28	N270638026FFA	N27347980B0ED
N100867252015	N13500583A0B8	N20286431120B	N232093518A69	N270638051B45	N27347981A164
N100867270307	N13500584D407	N202864322090	N23209370A850	N2706381144B9	N2734798293FF
N10086728FBF0	N13500585C58E	N202864333119	N232093875F27	N27063819C8F1	N273479838276
N10086729EA79	N13500586F715	N2028643445A6	N232184498403	N270638216ED1	N27347984F6C9
N100867306E60	N13500587E69C	N20286435542F	N232184730131	N27063828F310	N27347985E740
N100867317FE9	N135005881E6B	N2028643666B4	N232184476D7D	N27063829E299	N27347986D5DB
N100867324D72	N135005890FE2	N20286437773D	N23291638CE79	N27063833541B	N27347987C452
N100867335CFB	N135005919A72	N202864388FCA	N23291639DFF0	N270638413A01	N273479883CA5
N1008673539CD	N13500592A8E9	N202864399E43	N232916400F39	N270638446DAC	N273479892D2C
N100867360B56	N13500593B960	N202864415F03	N232916411EB0	N270638565766	N27347990A935
N100867371ADF	N13500594CDDF	N202864426D98	N23291644491D	N2706385746EF	N27347991B8BC
N10086738E228	N13500595DC56	N2028644408AE	N232916488371	N27063858BE18	N273479928A27
N10086739F3A1	N13500596EEDC	N202864451927	N2329164992F8	N26986095BFD6	N273479939BAE
N100867402368	N13500597FF44	N202864462BBC	N2329165016E1	N269860986433	N27347994EF11

N10086742007A	N1350059807B3	N202864473A35	N23291653247A	N2698609975BA	N27347995FE98
N1008674311F3	N13500599163A	N20286448C2C2	N2329165673D7	N269861017436	N27347996CC03
N10086744654C	N13500600B387	N20286449D34B	N232916598B20	N2698610246AD	N27347997DD8A
N1008674574C5	N13500601A20E	N202864505752	N232916656B24	N269861035724	N27347998257D
N10086746465E	N135006029095	N2028645146DB	N2329166659BF	N26986104239B	N2734799934F4
N1008674757D7	N13500603811C	N2028645365C9	N232916674836	N269861053212	N2734800050CA
N10086748AF20	N13500604F5A3	N202864541176	N23291669A148	N269861060089	N273480014143
N10086749BEA9	N13500605E42A	N202864563264	N232916702551	N269861071100	N2734800273D8
N100867503AB0	N13500606D6B1	N2028645723ED	N2329167134D8	N26986108E9F7	N273480036251
N100867512B39	N13500607C738	N20286458DB1A	N232916720643	N26986109F87E	N2734800416EE
N1008675219A2	N135006083FCF	N20286459CA93	N2329167317CA	N269861107C67	N273480050767
N10086753082B	N135006092E46	N20268464F4E4	N232916746375	N269861116DEE	N2734800635FC
N100867547C94	N13500610AA5F	N20268466D7F6	N2329167572FC	N269861125F75	N273480072475
N100867565F86	N13500611BBD6	N202856960BB1	N232916764067	N269861134EFC	N27348008DC82
N10086758B6F8	N13500612894D	N20285698E2CF	N2329167751EE	N269861143A43	N27348009CD0B
N10086759A771	N1350061398C4	N20285701F2CA	N23291678A919	N269861152BCA	N273480104912
N1008676010D8	N13500614EC7B	N20285703D1D8	N23291679B890	N269861161951	N27348011589B
N100867610151	N13500615FDF2	N202857097E82	N23291680A699	N2698611708D8	N273480126A00
N100867632243	N13500616CF69	N20285712D989	N23291681B710	N26986118F02F	N273480137B89
N100867654775	N13500617DEE0	N20285714BCBF	N23291682858B	N26986119E1A6	N273480140F36
N1008676675EE	N135006182617	N202857169FAD	N232916839402	N26986120560F	N273480151EBF
N100867689C90	N13500619379E	N20285721C17A	N23291684E0BD	N269861214786	N273480162C24
N100867700900	N135006208037	N2028572496D7	N23291685F134	N26986122751D	N273480173DAD
N100867733B9B	N1350062191BE	N20285726B5C5	N23291686C3AF	N269861236494	N27348018C55A
N100867766C36	N13500622A325	N20285731D8A2	N23291687D226	N26986124102B	N27348019D4D3
N100867788548	N13500623B2AC	N20286398FEBF	N232916882AD1	N2698612501A2	N27348020637A
N1008677994C1	N13500624C613	N202864057E47	N231656273B3B	N269861263339	N2734802172F3
N100867808AC8	N13500625D79A	N20286415679F	N23165630565C	N2698612722B0	N273480224068
N100867819B41	N13500626E501	N202864223948	N2316563147D5	N26986128DA47	N2734802351E1
N10086782A9DA	N13500627F488	N20286429879B	N23165632754E	N269861304FD7	N27348024255E
N10086784CCEC	N135006280C7F	N202864404E8A	N23165636336A	N269861315E5E	N2734802534D7
N10086785DD65	N135006291DF6	N202864437C11	N23165638DA14	N269861326CC5	N27348026064C
N10086786EFFE	N1350063099EF	N202864527440	N231656423846	N269861337D4C	N2734802717C5
N10117331557C	N135006318866	N2028645500FF	N2316564329CF	N2698613409F3	N27321816281D
N1011735322BE	N13500632BAFD	N202864607D3A	N231656445D70	N26986135187A	N273218173994
N101173554788	N13500633AB74	N202864616CB3	N231656498695	N269861362AE1	N27321818C163
N101173567513	N13500634DFCB	N202864625E28	N23165652219E	N269861373B68	N27321819D0EA
N10117357649A	N13500635CE42	N202864634FA1	N231656533017	N26986138C39F	N273218206743
N101173589C6D	N13500636FCD9	N202864643B1E	N2316565444A8	N26986139D216	N2732182176CA
N101173612BC4	N13500637ED50	N202864652A97	N2316565667BA	N2698614002DF	N273218224451
N1011736308D6	N1350063815A7	N20286466180C	N231656577633	N269861411356	N2732182355D8

N101173647C69	N13500640D4E7	N202864670985	N23165669B525	N2698614221CD	N273218242167
N101173656DE0	N13500641C56E	N20286468F172	N23165672122E	N2698614444FB	N2732182530EE
N101173665F7B	N13500642F7F5	N20286469E0FB	N23165676540A	N269861455572	N273218260275
N101173674EF2	N13500643E67C	N2028647064E2	N231656774583	N2698614667E9	N2732182713FC
N10117368B605	N1350064492C3	N20286471756B	N232916893B58	N269861477660	N27321828EB0B
N10117369A78C	N13500645834A	N2028647247F0	N23291690BF41	N269861488E97	N27321829FA82
N10117371321C	N13500646B1D1	N202864735679	N23291691AEC8	N269861499F1E	N273218307E9B
N101173720087	N13500647A058	N2028647422C6	N232916929C53	N269861501B07	N273218316F12
N10117373110E	N1350064858AF	N20286475334F	N232916938DDA	N269861510A8E	N273218325D89
N1011737465B1	N135006494926	N2028647601D4	N23291694F965	N269861523815	N273218334C00
N1011737646A3	N13500650CD3F	N20286477105D	N23291695E8EC	N26986153299C	N2732183438BF
N10117378AFDD	N13500651DCB6	N20286478E8AA	N23291696DA77	N269861545D23	N273218352936
N10117380A05D	N13500652EE2D	N20286479F923	N23291697CBFE	N269861554CAA	N273218361BAD
N1011738392C6	N13500653FFA4	N20286480E72A	N232916983309	N269861567E31	N273218370A24
N10117384E679	N135006559A92	N20286481F6A3	N232916992280	N269861576FB8	N27321838F2D3
N10117385F7F0	N13500656A809	N20286482C438	N232917003285	N26986158974F	N27321839E35A
N10117386C56B	N13500657B980	N20286483D5B1	N23291701230C	N2698615986C6	N273218403393
N10117387D4E2	N135006584177	N20876804899F	N232917021197	N26986160316F	N27321841221A
N101173893D9C	N1350065950FE	N208768059816	N23291703001E	N2698616120E6	N273218421081
N10117390B985	N13500660E757	N20876806AA8D	N2329170474A1	N26986162127D	N2874293122C3
N10117391A80C	N13500661F6DE	N20876807BB04	N232917056528	N2698616303F4	N287429321058
N101173938B1E	N135005908BFB	N2087680843F3	N2329170657B3	N26986164774B	N28742934756E
N10117394FFA1	N13500662C445	N20876809527A	N23291707463A	N27063699162A	N2874293564E7
N10117396DCB3	N13500663D5CC	N20876810D663	N23291708BECB	N270638475F37	N28742936567C
N10117397CD3A	N13500664A173	N20876811C7EA	N232917102B5D	N270638654F95	N2874293747F5
N1011739835CD	N13500665B0FA	N20876812F571	N232917113AD4	N270638667D0E	N28742938BF02
N10117400E298	N135006668261	N20876813E4F8	N23291712084F	N2706386985F9	N28742939AE8B
N10117402C18A	N1350066793E8	N208768149047	N2329171319C6	N27063873337B	N287429407E42
N10117403D003	N135006686B1F	N2087681581CE	N232917146D79	N2706387447C4	N287429416FCB
N10117404A4BC	N135006697A96	N20876816B355	N24265817CA2D	N27063884C40C	N287429434CD9
N10117405B535	N13500670FE8F	N20876817A2DC	N24265827E045	N270638880E60	N287429443866
N1011740687AE	N13500671EF06	N208768185A2B	N242658817803	N27063893A96B	N2874294529EF
N101174079627	N13500672DD9D	N208768194BA2	N24265888E5C2	N27063907628B	N287429461B74
N10117408ED0	N13500673CC14	N20876821ED82	N2426589161DB	N270639133D77	N28742948F20A
N101174097F59	N13500674B8AB	N20876822DF19	N24265925998B	N2706391449C8	N28742949E383
N10117411EAC9	N13500675A922	N20876823CE90	N24265937A341	N27063919922D	N287429517613
N10086560A560	N135006769BB9	N20876824BA2F	N2426594816BE	N270639202584	N287429524488
N10086571AD31	N135006778A30	N20876825ABA6	N24265953B1B5	N2706392463A0	N287429535501
N100865738E23	N1350067872C7	N20876826993D	N24265957F791	N270639330EC7	N2874295421BE
N10086574FA9C	N13500679634E	N2087682788B4	N242659628A54	N2706393748E3	N287429553037
N10086576D98E	N135006807D47	N208768287043	N24265970B09E	N269860979CC4	N2874295602AC

N1008658568DD	N135006816CCE	N2087682961CA	N24265971A117	N2698610065BF	N287429571325
N100865957105	N135006825E55	N20876830E5D3	N24265988BF1E	N26986129CBCE	N28742958EBD2
N10086596439E	N135006834FDC	N20876831F45A	N2426600513E8	N269861433044	N28742959FA5B
N100866133597	N135006843B63	N20876832C6C1	N2426600730FA	N2698616566C2	N287429604DF2
N100866246B40	N135006852AEA	N20876833D748	N2426602431D1	N269861665459	N287429615C7B
N100866312535	N135006861871	N20876834A3F7	N242660252058	N2698616745D0	N287429640BD6
N1008663217AE	N1350068709F8	N20876835B27E	N24078195337C	N26986168BD27	N2874296628C4
N100866434B2F	N13508522A999	N2087683680E5	N2407819601E7	N26986169ACAE	N28742967394D
N100866461C82	N13508523B810	N20876837916C	N240782027FBF	N2698617028B7	N28742968C1BA
N10086652437E	N13508524CCAF	N20876838699B	N242660457488	N26986171393E	N28742969D033
N1008665714D3	N13508525DD26	N208768397812	N242660503AFD	N269861720BA5	N28742970542A
N100866673EBB	N13508526EFBD	N20876840A8DB	N242660601095	N269861731A2C	N2874297145A3
N100866750471	N13508527FE34	N20876841B952	N2426606675A3	N269861746E93	N287429727738
N10086682F306	N1350852806C3	N208768428BC9	N242660777DF2	N269861757F1A	N2874297366B1
N10086686B522	N13508529174A	N208768439A40	N24307206B7C3	N269861764D81	N28742974120E
N10086787FE77	N134794287453	N20876844EEFF	N243072085EBD	N269861775C08	N287429772095
N100867880680	N1347942965DA	N20876845FF76	N24307211DAA4	N26986178A4FF	N28742978D862
N100867891709	N13479430E1C3	N20876846CDED	N24307213F9B6	N26986179B576	N28742979C9EB
N100867918299	N13479431F04A	N208768482493	N243072159C80	N270637230704	N28742980D7E2
N10086792B002	N13479432C2D1	N20876849351A	N243072184765	N27063939A19D	N28742981C66B
N10086793A18B	N13479433D358	N20876850B103	N24307221F0CC	N270641759D72	N287429626EE0
N10086794D534	N13479434A7E7	N20876851A08A	N24307224A761	N27064176AFE9	N287429637F69
N10086796F626	N13479435B66E	N208768538398	N243072286D0D	N27064177BE60	N28742950679A
N10086797E7AF	N13479437957C	N20876854F727	N24307230F89D	N270641784697	N287429470AFD
N100867990ED1	N134794386D8B	N20876855E6AE	N24307232DB8F	N270641804917	N287429651A5F
N100868000ECF	N134794397C02	N20876857C5BC	N243072369DAB	N27064181589E	N28742976311C
N100868011F46	N13479440ACCB	N208768583D4B	N24307240B595	N270641826A05	N288704349322
N100868022DDD	N13479441BD42	N208768592CC2	N243072429687	N270641837B8C	N2887043582AB
N100868033C54	N134794428FD9	N2090645754E8	N24307244F3B1	N270641840F33	N28870436B030
N100868055962	N134794439E50	N20906458AC1F	N24265873D8D9	N270641851EBA	N28870437A1B9
N100868066BF9	N13479444EAEF	N209064600A3F	N24265944DCD2	N270641862C21	N28870438594E
N100868077A70	N13479445FB66	N20906462292D	N242659957D23	N270641873DA8	N2887043948C7
N100868088287	N13479446C9FD	N209064644C1B	N24307266E313	N27064188C55F	N28870440980E
N10086809930E	N13479447D874	N209064666F09	N243072680A6D	N27064189D4D6	N288704418987
N100868101717	N1347943684F5	N209064677E80	N24307274D9D9	N2706419050CF	N28870442BB1C
N100868123405	N140714821415	N20906471026E	N24307275C850	N270641914146	N28870443AA95
N10086813258C	N14071483059C	N2090647230F5	N24307276FACB	N2706419273DD	N28870444DE2A
N1008681540BA	N1407148560AA	N20906473217C	N24307277EB42	N270641936254	N28870445CFA3
N1008681763A8	N140714865231	N2090647455C3	N2430727813B5	N2706419416EB	N28870446FD38
N100868189B5F	N1407148743B8	N20906475444A	N24307279023C	N270641950762	N288704481446
N100868198AD6	N14071488BB4F	N209064776758	N243072801C35	N2706419635F9	N2887044905CF

N100868212CF6	N14071489AAC6	N209064789FAF	N243072810DBC	N270641972470	N2887045081D6
N100868221E6D	N140714902EDF	N209064798E26	N243072823F27	N27064198DC87	N28870451905F
N100868230FE4	N140714913F56	N20906480902F	N243072832EAE	N27064199CD0E	N28870452A2C4
N100868247B5B	N140714920DCD	N2090648181A6	N243072845A11	N2706420068B3	N28870453B34D
N100868256AD2	N140714931C44	N20906482B33D	N243072854B98	N27064201793A	N288704812027
N1008682749C0	N1407149468FB	N20906483A2B4	N243072867903	N270642024BA1	N2887048212BC
N10086829A0BE	N140714957972	N20906484D60B	N24307287688A	N270642035A28	N288704830335
N10086831352E	N140714964BE9	N20906485C782	N24307288907D	N271862047272	N28870484778A
N101173433B66	N140714975A60	N20906486F519	N2430728981F4	N2718620563FB	N288704856603
N101173477D42	N14071498A297	N20906487E490	N2430729005ED	N271862065160	N288704865498
N101173598DE4	N14071499B31E	N209064881C67	N243072911464	N27186208B81E	N288704874511
N10086557FBB7	N14071500A31B	N209064890DEE	N2430729226FF	N27186209A997	N28870488BDE6
N100866604A04	N14071501B292	N2090649089F7	N243072933776	N271862102D8E	N28870489AC6F
N100866885C5C	N140715028009	N20906492AAE5	N2430729443C9	N271862113C07	N288704902876
N10086702671A	N140715039180	N20906493BB6C	N243072955240	N271862120E9C	N2887049139FF
N100867114C59	N14071504E53F	N20906496ECC1	N24078197106E	N271862131F15	N288704920B64
N100867698D19	N14071505F4B6	N208768529211	N2430724839DD	N271862146BAA	N288704931AED
N100867755EAD	N14071506C62D	N20876856D435	N243072528F5F	N271862157A23	N288704946E52
N10086783B853	N14071507D7A4	N209064564561	N243426693BC2	N271862175931	N288704957FDB
N10086795C4BD	N140715082F53	N20906459BD96	N24342670BFDB	N27186218A1C6	N288704964D40
N1008680448EB	N140715093EDA	N209064611BB6	N24342671AE52	N27186219B04F	N28870498A43E
N100868203D7F	N14071510BAC3	N2090646997FE	N243426738D40	N269703418788	N28870499B5B7
N10117333766E	N14071511AB4A	N2090647013E7	N24342674F9FF	N269860968D4D	N28870500A5B2
N10117379BE54	N140715138858	N2090647676D1	N24342675E876	N270637859F42	N2887050286A0
N10117410FB40	N14071514FCE7	N20906491987E	N24342676DAED	N2718620740E9	N28870505F21F
N10160503ED22	N14071527E414	N20906494CFD3	N24342677CB64	N2718621648B8	N28870506C084
N10160504999D	N14071542E769	N20906495DE5A	N24342679221A	N2718622007E6	N28870507D10D
N101605058814	N1407155851EB	N20906497FD48	N243426803C13	N270017442585	N2887050829FA
N10160507AB06	N140715594062	N2090649805BF	N243426812D9A	N27001745340C	N288705093873
N101605094278	N14071560F7CB	N209064991436	N243426821F01	N270017460697	N28870510BC6A
N10160513F4FA	N14071561E642	N209065000433	N243426830E88	N27001747171E	N2874293301D1
N10160516A357	N14071562D4D9	N2090650115BA	N243426847A37	N27001749FE60	N28870447ECB1
N10160520EC09	N14071563C550	N209065022721	N243426856BBE	N270017507A79	N288704975CC9
N10160521FD80	N14071564B1EF	N2090650336A8	N243426865925	N270017516BF0	N28870501B43B
N10160522CF1B	N14071565A066	N209065044217	N2434268748AC	N27001752596B	N288705039729
N10160523DE92	N14071572CD01	N20906505539E	N24342688B05B	N2700175348E2	N28870504E396
N10160524AA2D	N14071575B9BE	N209065066105	N24342689A1D2	N270017543C5D	N287429425D50
N10160525BBA4	N140715768B25	N20906507708C	N2434269025CB	N270017552DD4	N290952904FCD
N1016052798B6	N140715779AAC	N20906508887B	N243426913442	N27001758F631	N290952915E44
N10160533C74A	N14071578625B	N2090650999F2	N2434269206D9	N270017614198	N290952926CDF
N1016053690E7	N1407157973D2	N209065101DEB	N243426931750	N270017627303	N290952937D56

N10160537816E	N140715806DDB	N209065110C62	N24417331A45D	N270017641635	N2909529409E9
N101605396810	N140715817C52	N209065123EF9	N2441733296C6	N27001779D408	N290952951860
N10160540B8D9	N140715824EC9	N209065145BCF	N24417333874F	N27001782E913	N290952962AFB
N101605429BCB	N140715835F40	N209065154A46	N24417334F3F0	N270017848C25	N290952973B72
N101605438A42	N140715842BFF	N2090651678DD	N24417335E279	N27001787BEBE	N29095298C385
N10160544FEFD	N140715853A76	N209065176954	N243074154A59	N2700178957C0	N29095299D20C
N10160545EF74	N1407158608ED	N2090651891A3	N2430741678C2	N27001791C250	N29095300C209
N10160546DDEF	N140715871964	N20906519802A	N24307417694B	N27001792F0CB	N29095301D380
N101605483491	N14071589F01A	N209065203783	N2430741891BC	N27001797A766	N29095302E11B
N101605492518	N140715907403	N20906521260A	N24307420379C	N270017985F91	N29095303F092
N10160551B088	N140715934698	N209065221491	N243074212615	N270018040822	N2909530595A4
N10160557D5BE	N140715943227	N209065230518	N24307422148E	N2700180519AB	N29095306A73F
N101605582D49	N14071598F84B	N2090652471A7	N243074230507	N270018073AB9	N29095307B6B6
N101605608B69	N14071599E9C2	N20906525602E	N2430742471B8	N2700181057DE	N290953084E41
N101605619AE0	N140716004C7F	N2090652652B5	N243074256031	N270018207DB6	N29095310DBD1
N10160563B9F2	N140716015DF6	N20906527433C	N2430742652AA	N270018216C3F	N29095311CA58
N10160564CD4D	N140716026F6D	N209065302E5B	N243074274323	N270018225EA4	N29095312F8C3
N10160567FFD6	N140716037EE4	N209065313FD2	N24307428BBD4	N270018234F2D	N29095313E94A
N1016056916A8	N140716040A5B	N20876847DC64	N24307429AA5D	N270018243B92	N290953149DF5
N101605718338	N140716051BD2	N2090645577FA	N243074302E44	N270018252A1B	N29095316BEE7
N10160572B1A3	N140716062949	N2090646338A4	N243074313FCD	N270018261880	N290953185799
N10160573A02A	N1407160738C0	N209064655D92	N243074320D56	N270018270909	N290953194610
N10160576F787	N1407534171C7	N209064688677	N243074331CDF	N27001828F1FE	N29095320F1B9
N10160577E60E	N14075342435C	N209065132F70	N243074346860	N2700183356F5	N29095321E030
N101605790F70	N1407534352D5	N20906528BBCB	N2430743579E9	N2700183533C3	N29095322D2AB
N101605801179	N14075344266A	N2108901167A0	N243074364B72	N2700183710D1	N29095323C322
N1016058100F0	N1407534537E3	N21089012553B	N243074375AFB	N27001838E826	N29095324B79D
N10160582326B	N140753460578	N2108901344B2	N24307438A20C	N270018431BFD	N29095325A614
N1016058323E2	N1407534714F1	N210890152184	N24307439B385	N270018446F42	N29095326948F
N10160584575D	N14075348EC06	N21089016131F	N24307440634C	N270018475DD9	N290953278506
N1016058546D4	N14075349FD8F	N210890170296	N2430744172C5	N27001849B4A7	N290953287DF1
N101605889D31	N140753507996	N21089018FA61	N24307442405E	N270018512137	N290953296C78
N101605898CB8	N14075351681F	N210890205C41	N2430744351D7	N2700185213AC	N29095330E861
N1016059008A1	N140753525A84	N210890214DC8	N243074442568	N27001854769A	N29095331F9E8
N10086567D1DF	N140753534B0D	N210890227F53	N2430744534E1	N270018565588	N29095332CB73
N100865812EF9	N140753552E3B	N210890241A65	N24307446067A	N27001858BCF6	N29095333DAFA
N100866001ED4	N140753561CA0	N210890250BEC	N2430744717F3	N270018645CF2	N29095334AE45
N1008661550A1	N140753570D29	N210890263977	N24307448EF04	N270018667FE0	N290953368D57
N100866257AC9	N14075358F5DE	N2108902728FE	N243074507A94	N270018676E69	N290953379CDE
N10086719C011	N14075359E457	N21089028D009	N243074516B1D	N270018711287	N29095335BFCC
N100867342844	N1407536053FE	N21089029C180	N243074525986	N27001874452A	N290953095FC8

N1008674132E1	N140753614277	N21133229EB51	N24307453480F	N2700187554A3	N290953158C7C
N100867574E0F	N1407536270EC	N211332306F48	N243074543CB0	N2700187777B1	N290953386429
N1008676233CA	N140753636165	N211332317EC1	N243074561FA2	N27001881914F	N2909533975A0
N1008676456FC	N1407536415DA	N211332324C5A	N243074570E2B	N27001883B25D	N293001981FAF
N100867744F24	N140753650453	N211332335DD3	N24307458F6DC	N27001884C6E2	N2930322831AE
N10086811069E	N1407536636C8	N21133234296C	N24307459E755	N27001885D76B	N293032804096
N101173444FD9	N140753672741	N2113323538E5	N2430746050FC	N27001886E5F0	N29303285173B
N10117377572A	N14075368DFB6	N211332360A7E	N2430746273EE	N270018918897	N2930329148C7
N10117401F311	N14075369CE3F	N21133238E300	N243074636267	N27001892BA0C	N29303324A11E
N101605911928	N140753704A26	N21133239F289	N2430746416D8	N27001893AB85	N293033279385
N101605922BB3	N140715290D6A	N211332402240	N243074650751	N27001895CEB3	N29303347C755
N101605944E85	N140753543FB2	N2113324133C9	N243074672443	N270018981556	N29303227C959
N101605955F0C	N141186283557	N211332420152	N24307468DCB4	N2700190014DA	N2930339666A4
N101605966D97	N14042444E082	N2113324310DB	N24307469CD3D	N2700190237C8	N293034041EAB
N101605977C1E	N141187049657	N211332446464	N243074704924	N27001909891B	N293034242D1B
N1016059884E9	N14118723D158	N211332464776	N2430747158AD	N270019100D02	N293034271F80
N1016060030DD	N14118745E0BE	N2113324756FF	N243074726A36	N270019111C8B	N2930344479CB
N101606012154	N1419449751A4	N21133248AE08	N243074737BBF	N270019122E10	N293034798846
N101606030246	N14194498A953	N21133249BF81	N243074198035	N270019133F99	N29303482B55D
N1016060476F9	N14194499B8DA	N211332503B98	N243074552D39	N270019144B26	N29303485C1E2
N101606074462	N14194500A8DF	N211332512A11	N2430746635CA	N270019155AAF	N2930350330C8
N10160608BC95	N14194501B956	N21133252188A	N243074740F00	N2700192570C7	N2930350555FE
N101606102905	N141945028BCD	N211332530903	N243074751E89	N271864857BE2	N293035230378
N10160611388C	N141945039A44	N211332556C35	N243074762C12	N27186489B18E	N2930352477C7
N101606120A17	N14194504EEFB	N211332565EAE	N243074773D9B	N271864903597	N29303525664E
N101606131B9E	N14194505FF72	N211332574F27	N24307478C56C	N27186491241E	N2930352654D5
N101606146F21	N14194506CDE9	N21133258B7D0	N24307480CAEC	N271864921685	N29303527455C
N101606157EA8	N14194507DC60	N211332610079	N24307481DB65	N27186493070C	N29303528BDAB
N101606164C33	N141945082497	N2113326232E2	N24307482E9FE	N2718649473B3	N29303529AC22
N101606175DBA	N14194509351E	N21133263236B	N24307483F877	N27186501A9DA	N29303530283B
N10160618A54D	N14194510B107	N2113326457D4	N243074848CC8	N27186504FE77	N2930353139B2
N10160619B4C4	N14194511A08E	N2113326674C6	N243182720552	N27186506DD65	N293035331AA0
N10160620036D	N141945129215	N21133267654F	N2431827314DB	N27186508341B	N293035346E1F
N1016062112E4	N14194513839C	N211332689DB8	N243182746064	N271865092592	N293035357F96
N10160622207F	N14194514F723	N211332698C31	N2431827571ED	N27186510A18B	N293035406533
N101606244549	N14194515E6AA	N211332722B3A	N2431827752FF	N27186511B002	N293035424621
N1016062554C0	N14194516D431	N211332733AB3	N24318278AA08	N27186515F626	N29303547118C
N10160626665B	N14194517C5B8	N211332744E0C	N24318279BB81	N27186516C4BD	N29303548E97B
N101606288F25	N141945183D4F	N211332755F85	N24318280A588	N27186517D534	N293035534E70
N101606301AB5	N141945192CC6	N211332777C97	N24318281B401	N271865219A6A	N293035543ACF
N101606310B3C	N141945209B6F	N211332788460	N24307449FE8D	N27186524CDC7	N293035570854

N1016063239A7	N141945218AE6	N2113327995E9	N24307479D4E5	N27186526EED5	N293035605683
N101606345C91	N14194522B87D	N211332808BE0	N243182764376	N27186527FF5C	N293035627591
N101606354D18	N14194524DD4B	N211332819A69	N243426729CC9	N2718652807AB	N293035636418
N101606376E0A	N14194525CCC2	N21133283B97B	N243426783393	N271865291622	N29303565012E
N1016063896FD	N14194526FE59	N21133284CDC4	N246888991708	N27186530923B	N293035507CEB
N101606398774	N14194527EFD0	N21133285DC4D	N24688900070D	N27186534D41F	N293035525FF9
N1016064057BD	N1419452906AE	N21133287FF5F	N246889011684	N27186535C596	N29303400588F
N101606414634	N1419453082B7	N21135781E84E	N24688902241F	N27001748EFE9	N29303538A473
N101606441199	N14194531933E	N21135782DAD5	N246889033596	N270017570EC6	N293035442317
N101606450010	N14194532A1A5	N21135783CB5C	N246889044129	N270018004E06	N293035516D62
N10160646328B	N14194533B02C	N21135784BFE3	N2468890550A0	N27001832477C	N2930355619DD
N10160648DBF5	N14200268D3B7	N21135788758F	N24688906623B	N2700188080C6	N29303549F8F2
N10160649CA7C	N14200269C23E	N211357896406	N2468890773B2	N2700190452FE	N2937289117DA
N101606504E65	N142002704627	N21135790E01F	N246889088B45	N270019166834	N293728922541
N101606515FEC	N1420027157AE	N21135791F196	N246889099ACC	N2700191990C3	N2937289334C8
N101606526D77	N142002726535	N21135792C30D	N246889101ED5	N2700192136E3	N293729008B97
N100866640C20	N1420027374BC	N21135793D284	N246889110F5C	N2700192315F1	N29372902A885
N10086718D198	N142002740003	N21135794A63B	N246889123DC7	N27001924614E	N29372905DC3A
N100867981F58	N14200275118A	N2113579587B2	N246889132C4E	N27001926425C	N29372906EEA1
N100868145133	N142002762311	N2113579794A0	N2468891458F1	N270019321DA0	N29372907FF28
N100868167221	N142002773298	N211357986C57	N246889154978	N27001938B2FA	N293729091656
N100868265849	N14200278CA6F	N211357997DDE	N246889167BE3	N2700194073BA	N29372910924F
N10086828B137	N14200279DBE6	N211358007DC0	N246889176A6A	N270019416233	N2937291183C6
N1008683024A7	N14200280C5EF	N211358016C49	N24688918929D	N27001946168C	N29372912B15D
N101173882C15	N14200281D466	N211358025ED2	N246889198314	N27001948FFF2	N29372916F779
N10160506BA8F	N14200282E6FD	N211358034F5B	N2468892034BD	N27001949EE7B	N29372917E6F0
N10160510C661	N14200283F774	N211358043BE4	N246889212534	N270019506A62	N293729181E07
N10160511D7E8	N1420028483CB	N211358052A6D	N2468892217AF	N270019517BEB	N29372921A9AE
N10160512E573	N142002859242	N2113580618F6	N246889230626	N270019553DCF	N293729229B35
N101605148045	N14200286A0D9	N21135807097F	N246889247299	N270019626318	N29372926DD11
N1016051591CC	N14200287B150	N21135808F188	N246889256310	N2700196517A7	N29372927CC98
N10160517B2DE	N1420028849A7	N211358106418	N24688926518B	N27001968CC42	N29372928346F
N101605195BA0	N14200289582E	N211358117591	N246889288BF5	N2700197059D2	N29372931B076
N10160526893F	N14200290DC37	N21135812470A	N24688929A97C	N270019727AC0	N2937293282ED
N101605286041	N14200291CDBE	N211358135683	N246889302D65	N270019763CE4	N293729339364
N1016052971C8	N14200292FF25	N21135814223C	N246889320E77	N270019772D6D	N29372934E7DB
N10160530F5D1	N14200293EEAC	N2113581533B5	N246889331FFE	N27001979C413	N29372935F652
N10160532D6C3	N142002949A13	N2113581710A7	N246889346B41	N27001981CB93	N29372936C4C9
N10160534B3F5	N142002958B9A	N21135818E850	N246889357AC8	N27001982F908	N29372937D540
N10160535A27C	N14200296B901	N21135819F9D9	N246889364853	N27001983E881	N293729382DB7
N101605387999	N14200297A888	N211358204E70	N2468893759DA	N270019849C3E	N29386714DC60

N10160541A950	N14200298507F	N211358215FF9	N24688938A12D	N270019858DB7	N29386915DDF2
N10160547CC66	N1420029941F6	N211358237CEB	N24688939B0A4	N27001986BF2C	N293869695A96
N10160550A101	N1420030051F3	N211358240854	N24688942437F	N27001987AEA5	N2938700102AB
N101605528213	N14200301407A	N2113582519DD	N2468894352F6	N270019885652	N2938704165CB
N10160553939A	N1420030272E1	N211358262B46	N24318931790F	N2700198947DB	N293870959397
N10160554E725	N142003036368	N211358273ACF	N243189324B94	N27001990C3C2	N29387187F381
N10160555F6AC	N1420030417D7	N21135829D3B1	N243189335A1D	N27001991D24B	N293871990327
N10160556C437	N14200305065E	N2113583057A8	N243189342EA2	N27001992E0D0	N2938821881F3
N101605593CC0	N1420030634C5	N211358314621	N243189353F2B	N27001993F159	N2938823569A6
N10160562A87B	N14200307254C	N21135834118C	N243189360DB0	N2700199485E6	N293728966365
N10160565DCC4	N14200308DDBB	N211358350005	N243189371C39	N27001995946F	N2937289772EC
N101605680721	N14200309CC32	N21135836329E	N24318938E4CE	N27001996A6F4	N293728988A1B
N1016057092B1	N14200310482B	N211358372317	N24318939F547	N27001997B77D	N29388259F71A
N10160575C51C	N1420031159A2	N21135838DBE0	N24318940258E	N270019995E03	N293883026DAD
N101605781EF9	N142003126B39	N21135839CA69	N243189413407	N27002000AD09	N29388329E0CE
N1016058765C6	N142003137AB0	N211358401AA0	N24318942069C	N27002001BC80	N29388362397D
N1016060213CF	N142003140E0F	N21089019EBE8	N2431894463AA	N270020028E1B	N294115643E44
N1008661773B3	N142003151F86	N210890236EDA	N243189457223	N270020039F92	N29411703AB93
N100867676467	N142003162D1D	N210890304599	N2431894640B8	N27002004EB2D	N29411712A3C2
N100867722A12	N142003173C94	N2113324575ED	N243189475131	N27002005FAA4	N29411798C258
N10117349943C	N14200319D5EA	N211332547DBC	N24318949B84F	N27002006C83F	N29411914D6EF
N10117362195F	N1420032173CA	N21133259A659	N243189503C56	N27002007D9B6	N29411934E55F
N10117395EE28	N142003513EC2	N21133265465D	N243189512DDF	N270020082141	N29411952D4B9
N10160574D495	N1420035578E6	N211332700828	N243189530ECD	N2700200930C8	N29412008BC88
N101605999560	N142003564A7D	N2113327119A1	N243189547A72	N27002010B4D1	N29412045000D
N1016060655EB	N142003600523	N21133282A8F2	N243189556BFB	N27002011A558	N294121612F45
N101606299EAC	N142003622631	N211358410B29	N243189565960	N2700201297C3	N294121882894
N10160633282E	N1420036337B8	N211358445C84	N2431895748E9	N27002013864A	N29412202A66A
N101606436526	N142003666015	N211358467F96	N24318958B01E	N27002014F2F5	N294142583C12
N101606056770	N14200367719C	N211358476E1F	N24318959A197	N27002015E37C	N294142791E2B
N1016062331F6	N14200368896B	N2113584896E8	N24318960163E	N27002016D1E7	N29414300943E
N100867909310	N1420036998E2	N211358500378	N24318962352C	N27002017C06E	N294143684CA6
N1016062777D2	N142003701CFB	N2113585112F1	N2431896324A5	N270020183899	N294143695D2F
N100865821C62	N142003723FE9	N21135852206A	N24318964501A	N270020192910	N29414371C8BF
N10160566EE5F	N142003732E60	N2113585331E3	N243189654193	N270020209EB9	N294144067D0D
N10160586744F	N142003754B56	N2113585554D5	N243189667308	N270020218F30	N2941449952E2
N10160609AD1C	N1420037679CD	N211358588F30	N243189676281	N27002022BDAB	N29414501536E
N100865508F08	N142003776844	N21089014300D	N243189689A76	N27002023AC22	N294145243773
N100865803F70	N1420037890B3	N21135816012E	N243189698BFF	N27002024D89D	N29414545722A
N100867556D1D	N141945281727	N211358226D62	N243189700FE6	N27002025C914	N29414736B801
N100867711889	N14200318C463	N2113585777C7	N243189711E6F	N27002026FB8F	N29414744D61B

N101173603A4D	N1420041959EF	N211357869CF1	N243189722CF4	N27002027EA06	N29414753BB7C
N101173757438	N14200424A862	N211357878D78	N243189733D7D	N2700202812F1	N29414774FC73
N10117381B1D4	N14200417B091	N211357968529	N246889442649	N270020290378	N29414801AC11
N10117382834F	N14205784D421	N2113583274BA	N2468894537C0	N270020308761	N294148390A31
N101173929A97	N1420577457E9	N211358336533	N2468894714D2	N2700203196E8	N294148697489
N101173992444	N141964901C6D	N211358454D0D	N24688948EC25	N27002032A473	N2941490793FB
N101605184A29	N141964932EF6	N211332371BF7	N24688949FDAC	N27002033B5FA	N29414947F49B
N101605933A3A	N141964945A49	N211719498241	N2468895079B5	N27002034C145	N294150107E39
N10117338C8BD	N1419649768D2	N21171952254A	N24688951683C	N27002035D0CC	N294150411108
N10086726128E	N141964989025	N211719588A10	N246889525AA7	N27002036E257	N294150731872
N101606472302	N1419649981AC	N211719631EAB	N246889552E18	N27002037F3DE	N294151441C79
N1016050853F1	N1419650091A9	N211719646A14	N246889561C83	N270020380B29	N294151707035
N101606367F83	N141965018020	N211719657B9D	N246889570D0A	N270019984F8A	N29415203E0C2
N10086679CE1D	N14196502B2BB	N211719664906	N24688958F5FD	N270017740FED	N29415240B539
N10086708C840	N14196504D78D	N21171969B1F1	N243189431715	N270019365B84	N29415276FA67
N100867777DBF	N14370378A444	N2117197035E8	N243189521F44	N270019542C46	N29415312B24F
N1011733267E7	N14370385FC69	N2117197216FA	N2431896107B7	N27001958E62A	N29415342CCF7
N101173501025	N14370386CEF2	N211719730773	N24688940606D	N270019637291	N2941537483A9
N10160531E458	N14370387DF7B	N2117197473CC	N24688946055B	N270019750E7F	N29415403361B
N1016064274AF	N14370394F438	N211719756245	N246889274002	N2700179495FD	N2941543468CC
N10086704022C	N14370395E5B1	N211358498761	N246889543F91	N27204819AC1E	N294156219301
N10272051B77A	N14370396D72A	N211719423C92	N24318948A9C6	N272048201BB7	N2937289551FE
N1027205285E1	N14370397C6A3	N2117194893C8	N2508129087FF	N272048210A3E	N293871475A21
N10272054E0D7	N143703983E54	N211719712461	N250812919676	N2720482238A5	N29388282F9B1
N10272055F15E	N143703992FDD	N21135843283B	N25081292A4ED	N27204823292C	N294117926D02
N10272056C3C5	N14370403DB9A	N21135854455C	N25081293B564	N272048245D93	N29411863B584
N10272057D24C	N14370404AF25	N21135856664E	N25081294C1DB	N272048254C1A	N29451428E484
N102720582ABB	N14370405BEAC	N2117195334C3	N25081295D052	N272048267E81	N29451429F50D
N102720593B32	N143704068C37	N211719602C30	N25081296E2C9	N272048276F08	N2945143526B9
N102720608C9B	N143704079DBE	N21171968A078	N25081297F340	N272048298676	N2945145025C4
N102720619D12	N1437040974C0	N222267971E3A	N250812980BB7	N27204830026F	N294514677B13
N10272062AF89	N14196465C808	N22226798E6CD	N250812991A3E	N27204832217D	N29451483A727
N10272063BE00	N14196466FA93	N22226799F744	N250813000A3B	N2720483330F4	N294515364EFE
N10272065DB36	N14196467EB1A	N22226800F75A	N250813011BB2	N27204834444B	N294515704CA8
N10272066E9AD	N1419646813ED	N22226801E6D3	N250813022929	N2720483555C2	N29451646EC92
N10272067F824	N14196474C059	N22226802D448	N2508130338A0	N272048366759	N29451647FD1B
N1027206800D3	N14196475D1D0	N22226803C5C1	N250813066F0D	N2720483776D0	N29451650907C
N10272069115A	N14196476E34B	N22226804B17E	N250813077E84	N272048388E27	N29451656F54A
N103907230980	N14196477F2C2	N22226805A0F7	N250813088673	N272048399FAE	N2945167280DE
N103907247D3F	N141964780A35	N22226806926C	N2508130997FA	N272048404F67	N29451683129F
N103907256CB6	N141964899874	N2222680783E5	N2508131013E3	N272048415EEE	N294516947FF8

N103907265E2D	N14196505C604	N222268087B12	N25081311026A	N272048426C75	N294517083850
N103907274FA4	N141965108871	N222268096A9B	N250813132178	N272048437DFC	N294786614476
N10390728B753	N1419651199F8	N22226812CD90	N2508131455C7	N2720484518CA	N29478669C83E
N10390729A6DA	N14196512AB63	N22226813DC19	N25081315444E	N272048462A51	N294786740A03
N1039073022C3	N14196513BAEA	N22226814A8A6	N2508131676D5	N272048473BD8	N294786762911
N10390731334A	N14196514CE55	N22226815B92F	N25081317675C	N272048514736	N29478678C06F
N1039073201D1	N14196521B390	N222268168BB4	N250813189FAB	N272048643AF3	N29478680CFEF
N103907331058	N141965239082	N222268179A3D	N250813198E22	N272048652B7A	N29478683FD74
N1039073464E7	N141965293FD8	N222268197343	N25081320398B	N2720486619E1	N294787050C5E
N1039073647F5	N14196530BBC1	N22226821D563	N250813212802	N272048670868	N294787072F4C
N10390737567C	N14196531AA48	N22226822E7F8	N250813221A99	N27204868F09F	N29478719DFEA
N10390738AE8B	N1419653298D3	N22226823F671	N250813230B10	N27204869E116	N29478729F582
N10390739BF02	N141965383789	N2222682482CE	N250813247FAF	N272048717486	N294787352636
N103907406FCB	N141965392600	N222268259347	N250813256E26	N27204872461D	N294787447AB7
N103907424CD9	N14196540F6C9	N22226826A1DC	N250813265CBD	N2720487532A2	N2947874659A5
N103907435D50	N14196541E740	N22226827B055	N250813274D34	N2720487711B0	N29372903B90C
N1039074429EF	N141965478276	N2222682848A2	N25081328B5C3	N27204878E947	N2941202331EB
N103907453866	N141965487A81	N22226829592B	N25081329A44A	N27204879F8CE	N29414979378D
N103907460AFD	N14196554A935	N22226830DD32	N250813055D96	N27204881F74E	N2945145640F2
N103907471B74	N14196555B8BC	N22226831CCBB	N2508131230F1	N27204882C5D5	N294515715D21
N10390748E383	N141965568A27	N22226832FE20	N250813044C1F	N27204883D45C	N294787235AD8
N10390749F20A	N141965579BAE	N22226833EFA9	N2468894171E4	N272048440943	N2945138895F1
N10390751679A	N141965586359	N222268349B16	N260661174C13	N27204848C32F	N2945154245D2
N103907525501	N1419655972D0	N22226836B804	N26066118B4E4	N27204849D2A6	N29478718CE63
N103907534488	N14196560C579	N22226838517A	N26066119A56D	N2720485056BF	N29632376E944
N103907543037	N14370410F0D9	N2222683940F3	N2606612012C4	N27204854109B	N296324026E6D
N103907561325	N14370411E150	N2222684181B3	N26066121034D	N272048550112	N29632623F9EC
N1039075702AC	N14370412D3CB	N22226843A2A1	N2606612231D6	N272048563389	N29632631C326
N10390758FA5B	N14370413C242	N22226844D61E	N26066123205F	N272048572200	N29632643AD3C
N103907605C7B	N14370415A774	N22226845C797	N2606612454E0	N27204858DAF7	N29632661BD9E
N103907614DF2	N1437041695EF	N22226846F50C	N26307389EC93	N27204859CB7E	N29632667D8A8
N103907636EE0	N143704178466	N222268481C72	N263073917903	N272048607CD7	N2963269469FB
N103907641A5F	N143704187C91	N222268490DFB	N263073924B98	N272048616D5E	N29632716DEF5
N103907650BD6	N143704196D18	N22226851986B	N263073935A11	N272048625FC5	N29632744835F
N10390766394D	N147326242DE7	N22226852AAF0	N263073942EAE	N272048760039	N29632764B0EF
N10390769C1BA	N147326421C01	N22226853BB79	N263073971C35	N27204880E6C7	N296327871864
N1039077045A3	N15238249964F	N22226854CFC6	N260661254569	N27204884A0E3	N29632812D216
N10390771542A	N1523825320CD	N22226855DE4F	N263073953F27	N27204885B16A	N29632205CC0B
N1039077266B1	N153634041E79	N22226856ECD4	N263073960DBC	N2720488683F1	N296322239A8D
N103907737738	N153634050FF0	N2222685805AA	N26307398E4C2	N272048879278	N296322496107
N103907740387	N15363408D415	N222268628098	N263074003397	N272048897B06	N296323278675

N103907762095	N15363409C59C	N222268639111	N26307401221E	N27204890FF1F	N29632345F1B7
N10390778C9EB	N153634104185	N22226866C6BC	N263074021085	N27204891EE96	N29632355E86F
N10390779D862	N1535453535A9	N22226867D735	N26307403010C	N27204893CD84	N296301040B90
N10390780C66B	N1535455470F0	N222268682FC2	N2630740475B3	N27204894B93B	N2968948770F9
N10390781D7E2	N18445434589D	N222268693E4B	N26307405643A	N27204895A8B2	N296895090D9B
N10390782E579	N184454354A14	N22226870BA52	N263074074728	N272048969A29	N296895282FA2
N10390783F4F0	N18445436788F	N22226871ABDB	N26307408BFDF	N272048978BA0	N296895659327
N1039078591C6	N184454376906	N222268729940	N26307409AE56	N2732434165EB	N296901859871
N10390787B2D4	N1844543891F1	N22226874FC76	N263074102A4F	N2732434523CF	N29692305DA7F
N103907884A23	N184454398078	N22226875EDFF	N263074175EF0	N2732434700DD	N296923795D1B
N103907895BAA	N1844544050B1	N22226876DF64	N26307418A607	N27324348F82A	N296924123B1D
N10390790DFB3	N18445443622A	N22226878361A	N26307419B78E	N273243517C33	N296924265751
N10390791CE3A	N184454441695	N222268792793	N263074200027	N273243524EA8	N296924737E44
N10390792FCA1	N18445445071C	N22226880399A	N2630742111AE	N273243535F21	N296924740AFB
N103907949997	N18445447240E	N222268812813	N263074222335	N273243542B9E	N2969247629E9
N10390795881E	N18445448DCF9	N222268847FBE	N2630742332BC	N273243553A17	N296925027819
N10390796BA85	N18445449CD70	N222268856E37	N263074244603	N27324356088C	N2969251627E5
N10390797AB0C	N184454504969	N222268874D25	N26307425578A	N273243571905	N296925235A20
N1039079853FB	N1844545158E0	N2222688885D2	N263074266511	N273243581F2	N294787206843
N103907994272	N184454526A7B	N22226889A45B	N263074277498	N27324359F07B	N296895487B72
N10390800426C	N184454537BF2	N222268902042	N263074288C6F	N2732436047D2	N29692327CADD
N1039080153E5	N184454540F4D	N2222689131CB	N263074299DE6	N27324361565B	N296925325271
N10390802617E	N184454551EC4	N222268920350	N2630743019FF	N2732436264C0	N2973028179B2
N1039080370F7	N184454562C5F	N2222681862CA	N263074310876	N273243637549	N297305322384
N103908040448	N184454573DD6	N2222689312D9	N263074323AED	N2732436401F6	N297305399D57
N1039080515C1	N18445458C521	N222268946666	N263074332B64	N27324365107F	N2973055145CF
N10390806275A	N18445459D4A8	N2222689577EF	N263074345FDB	N2732436622E4	N29730558D80E
N1039080736D3	N184454606301	N222269209E36	N263074354E52	N27324367336D	N29730630EFF2
N10390808CE24	N184454617288	N222269218FBF	N263074367CC9	N27324368CB9A	N297306368AC4
N10390809DFAD	N184454624013	N22226922BD24	N263074376D40	N27324369DA13	N29730640A2FA
N103908105BB4	N18445463519A	N22226923ACAD	N2630743895B7	N273243705E0A	N29730644E4DE
N103908114A3D	N1844546534AC	N22226924D812	N26307439843E	N273243714F83	N29730671991B
N1039081278A6	N184454660637	N22226925C99B	N2630744054F7	N273243736C91	N29730675DF3F
N10390813692F	N1844546717BE	N22226926FB00	N26307441457E	N27324374182E	N29689444EBC2
N103908141D90	N18445468EF49	N22226927EA89	N2630744277E5	N2732437509A7	N29692244F64A
N103908150C19	N183876854993	N2222692903F7	N26307443666C	N273243763B3C	N29729186104E
N103908163E82	N183876867B08	N2222693087EE	N2630744412D3	N273243772AB5	N297302835AA0
N102720539468	N183876876A81	N22226932A4FC	N26307445035A	N27324378D242	N297302853F96
N10390735756E	N183876889276	N22226933B575	N2630744631C1	N27324379C3CB	N29730288E473
N103907417E42	N1838768983FF	N22226934C1CA	N26307448D8BF	N27324380DDC2	N29730300FC27
N1039075521BE	N184454642525	N22226935D043	N26307449C936	N27324381CC4B	N29730305AB8A

N103907627F69	N18445469FEC0	N22226936E2D8	N263074537FB4	N27324383EF59	N29730645F557
N10390768D033	N184454707AD9	N22226937F351	N263074540B0B	N273243858A6F	N297305440BBA
N10390786A35D	N184454716B50	N222269380BA6	N263074562819	N27324386B8F4	N2982912839C9
N10390793ED28	N184454734842	N222269391A2F	N263074573990	N27324387A97D	N29829145B6FC
N103908172F0B	N184454743CFD	N22226941DB6F	N26307458C167	N273243894003	N2982914795EE
N10390818D7FC	N184454752D74	N22226943F87D	N263074606747	N27324390C41A	N29829150F889
N10390819C675	N184454761FEF	N222269448CC2	N2630746176CE	N27324391D593	N29829153CA12
N1039082071DC	N184454770E66	N222269459D4B	N263074624455	N27324392E708	N298291569DBF
N103908216055	N18445478F691	N22226947BE59	N2630746355DC	N27324393F681	N298291596548
N1039082252CE	N18445479E718	N2222694846AE	N263074642163	N27324394823E	N2982916494C5
N103908234347	N18445480F911	N22226951C2B7	N2630746530EA	N2732439593B7	N298291685EA9
N1039082437F8	N18445481E898	N22226952F02C	N263074660271	N27324396A12C	N298291694F20
N103908252671	N18445482DA03	N22226953E1A5	N2630746713F8	N27324397B0A5	N29829170CB39
N1039082614EA	N18445483CB8A	N222269558493	N26307468EB0F	N273243984852	N29829173F9A2
N103908270563	N18445484BF35	N22226956B608	N26307469FA86	N2732439959DB	N298291784771
N10390828FD94	N18445485AEBC	N22226957A781	N263074707E9F	N273244009F07	N2982918048F1
N10390829EC1D	N184454869C27	N222269585F76	N263074716F16	N273244018E8E	N298291840ED5
N103908306804	N184454887559	N222269594EFF	N263074725D8D	N27324402BC15	N298291851F5C
N10390831798D	N1844548964D0	N22226860A38A	N263074734C04	N27324403AD9C	N298291862DC7
N103908324B16	N18445490E0C9	N22226865F427	N2630747438BB	N27324404D923	N29829189D530
N103908335A9F	N18445491F140	N222268830B01	N263074752932	N27324405C8AA	N297302797632
N103908342E20	N18445492C3DB	N222268964574	N263074761BA9	N27324406FA31	N29885755A261
N103908353FA9	N18445493D252	N22226942E9F4	N263074770A20	N27324407EBB8	N298858269735
N103908360D32	N18445494A6ED	N22226954951A	N263074526E3D	N27324408134F	N2988582786BC
N103908371CBB	N184454414138	N22787512767B	N26307459D0EE	N2732440902C6	N29885847D26C
N10390839F5C5	N1844544273A3	N22787518D921	N2606612677F2	N2732441086DF	N29885864D347
N10390840250C	N184454463587	N227875216E88	N26307390688A	N273244119756	N298858998B6A
N103908413485	N1844547259CB	N22733961994B	N26307399F54B	N27324412A5CD	N29885917F608
N103908431797	N18387684581A	N22771606E785	N2630740656A1	N27324413B444	N29885929351E
N103908446328	N1844563935C0	N22771607F60C	N263074113BC6	N27324414C0FB	N29885944BA2B
N10390846403A	N18445640E509	N227716080EFB	N26307412095D	N27324415D172	N29829177BF86
N1039084751B3	N18445641F480	N227716091F72	N2630741318D4	N27324416E3E9	N299288516D8E
N10390848A944	N18445642C61B	N227716109B6B	N263074146C6B	N273244180A97	N29928864104B
N10390849B8CD	N18445643D792	N227716118AE2	N263074157DE2	N273244191B1E	N299288663359
N103908503CD4	N18445644A32D	N22771612B879	N263074164F79	N27324420ACB7	N29928868DA27
N103908521FC6	N1844564791B6	N22771613A9F0	N263074472048	N27324421BD3E	N299288737D2C
N103908530E4F	N184456486941	N22771614DD4F	N263074504D2F	N273244228FA5	N29928881DDF6
N103908547AF0	N1844564978C8	N22771615CCC6	N263074515CA6	N2720482897FF	N29928887B8C0
N103908556B79	N18445650FCD1	N22771616FE5D	N263074551A82	N2720483113E6	N299288949383
N1039085659E2	N18445651ED58	N22771617EFD4	N26307478F2D7	N2720485275AD	N29928896B091
N10390857486B	N18445652DFC3	N227716181723	N2700138934A1	N272048536424	N29829154BEAD

N1039086016BC	N18445653CE4A	N2277161906AA	N27001390B0B8	N272048634E4C	N29958379CB0C
N1039086235AE	N184660713B74	N22771620B103	N27001391A131	N272048735794	N299584695ED1
N103908632427	N18466095E740	N22771621A08A	N2700139293AA	N27204874232B	N29958499DD19
N103908645098	N18466096D5DB	N227716229211	N270013938223	N272048886A8F	N29958525A901
N103908654111	N18466097C452	N227716238398	N27001394F69C	N27204892DC0D	N29958571919D
N103908689AF4	N184660983CA5	N22771624F727	N27001395E715	N27321564B978	N299589603C6F
N103908698B7D	N184660992D2C	N22771625E6AE	N27001396D58E	N27321565A8F1	N29959011E04B
N103908700F64	N184661003D29	N22771626D435	N27001397C407	N273215669A6A	N29959043BDE1
N103908711EED	N184661012CA0	N22771627C5BC	N270013983CF0	N273215678BE3	N299590480332
N10272064CABF	N184661021E3B	N22771628D4B	N270013992D79	N273215687314	N299591182756
N10298402252E	N184661030FB2	N227716292CC2	N27001401FA2C	N27321569629D	N299593417197
N1029840334A7	N184661047B0D	N22771630A8DB	N27001403D93E	N27321570E684	N29959342430C
N102984055191	N184661056A84	N22771631B952	N270014068E93	N27321571F70D	N299593435285
N10298406630A	N18466106581F	N227716328BC9	N27001416974B	N27321572C596	N29959344263A
N102984077283	N184661074996	N227716339A40	N27001420D815	N27321573D41F	N2995934537B3
N102984088A74	N18466108B161	N22771634EEFF	N27001426BD23	N27321574A0A0	N299593460528
N102984099BFD	N18466109A0E8	N228832190BC8	N2700142945D4	N27321575B129	N2995934714A1
N102984101FE4	N1846611024F1	N22883220BC61	N27001431D044	N27321577923B	N294787014A7A
N102984110E6D	N184661113578	N22883221ADE8	N270014359660	N273215786ACC	N299289036AF8
N102984123CF6	N1846611207E3	N228832229F73	N27001436A4FB	N273215797B45	N29958547DEC3
N102984132D7F	N18466113166A	N228832238EFA	N270014419D4C	N2732158174C5	N29958986C349
N1029841459C0	N1846611462D5	N22883224FA45	N27001442AFD7	N27321582465E	N299590965A34
N102984167AD2	N18466115735C	N22883225EBCC	N27001452B60F	N2732158357D7	N298858811EFA
N1029841893AC	N18466117504E	N22883226D957	N27001453A786	N273215842368	N300436033E47
N102984198225	N18466118A8B9	N22883227C8DE	N27001454D339	N2732158532E1	N300436167032
N10298420358C	N18466119B930	N228832283029	N270014581955	N27321586007A	N3004362568C1
N102984212405	N184661200E99	N2288322921A0	N27001476C39B	N2732158711F3	N30043631373D
N10298422169E	N184661211F10	N22883230A5B9	N270014793B6C	N27321588E904	N3004365706DB
N102984230717	N184661222D8B	N2288323286AB	N270014820677	N27321589F88D	N30043659EFA5
N1029842473A8	N184661233C02	N228832339722	N270014864053	N273215907C94	N3004367262C6
N102984256221	N1846612448BD	N22883234E39D	N27001489B8A4	N273215916D1D	N30043682E10E
N1029842650BA	N186533639517	N22883235F214	N270014903CBD	N273215925F86	N30043693E95F
N102984274133	N18653364E1A8	N22883236C08F	N270014912D34	N273215934E0F	N300437242394
N10298428B9C4	N18653365F021	N22883237D106	N270014921FAF	N273215943AB0	N300437575C07
N10298429A84D	N18653366C2BA	N2288323829F1	N270014930E26	N273215952B39	N300437710A81
N102984302C54	N18653367D333	N228832393878	N270014974802	N2732159619A2	N30043772381A
N102984313DDD	N186533682BC4	N22883240E8B1	N27001498B0F5	N27321597082B	N300438220C65
N102984320F46	N186533693A4D	N22883241F938	N27001504F75D	N27321598F0DC	N300438264A41
N102984331ECF	N18653370BE54	N22883242CBA3	N27001505E6D4	N27321599E155	N300438374210
N102984357BF9	N18653371AFDD	N22883243DA2A	N27001506D44F	N2732160044E8	N3004384258B5
N102984364962	N186533729D46	N22883244AE95	N27001507C5C6	N273216015561	N30043850627F

N1029843758EB	N186533738CCF	N22883245BF1C	N27001510A8A1	N2732160267FA	N30043698578C
N10298438A01C	N18653376DB62	N228832468D87	N27001514EE85	N273216037673	N30043738F020
N10298439B195	N18653377CAEB	N228832479C0E	N27001515FF0C	N2732160402CC	N30084132A9B2
N10298440615C	N18445645B2A4	N22771636CDED	N27001516CD97	N273216051345	N3008417688F6
N1029844170D5	N18445646803F	N22771637DC64	N2700152082C9	N2732160621DE	N300843365A2E
N10298442424E	N1846611641C7	N227716382493	N270015219340	N273216073057	N300843894671
N1029844353C7	N184661266BAF	N22771639351A	N27001524C4ED	N27321608C8A0	N30084420AAC5
N102984442778	N184661277A26	N22771640E5D3	N27001525D564	N27321609D929	N30084440FE15
N1029844536F1	N1846612882D1	N22771641F45A	N270015280E81	N273216105D30	N30084467B91A
N10298446046A	N184661301741	N22771642C6C1	N270015291F08	N273216114CB9	N30084487230A
N1029844715E3	N1846613106C8	N22771643D748	N270015309B11	N273216127E22	N300845296DD8
N10298448ED14	N184661323453	N22771644A3F7	N270015318A98	N273216136FAB	N300845538F8A
N10298449FC9D	N1846613325DA	N22771645B27E	N27001540D619	N273216141B14	N30156669A4F5
N102984507884	N184661345165	N2277164680E5	N27001542F50B	N273243425770	N30156681B2AD
N10298451690D	N1846613540EC	N22771647916C	N27001400EBA5	N2732434346F9	N301566828036
N102984525B96	N184661367277	N22771648699B	N27001427ACAA	N273243443246	N3015668391BF
N102984534A1F	N1846613763FE	N227716497812	N27001541C790	N27324349E9A3	N30156690BAFC
N102984543EA0	N184661389B09	N22771650FC0B	N27001543E482	N273243506DBA	N3015669299EE
N102984552F29	N184661398A80	N22771651ED82	N27001544903D	N27324382FED0	N30156694FCD8
N102984570C3B	N184661405A49	N22771652DF19	N2700154581B4	N273243849BE6	N3015669836B4
N10298458F4CC	N184661414BC0	N22771653CE90	N270015485A51	N27324424EA93	N301567074387
N10298459E545	N18466142795B	N22771655ABA6	N27001550CFC1	N27324425FB1A	N30156709AAF9
N1029846052EC	N1846614368D2	N22771656993D	N27001552ECD3	N27324426C981	/

呼吸机（注册证编号：国械注进 20192082053），型号 BiPAP A40，受影响设备序列号请见下表。

V232185218619	V1648975517DB	V212324176E06	V26438671E914	V26970411F56B	V281083525EE8
V26985918937E	V164897562540	V212324198778	V26438673CA06	V2697042842C2	V281083534F61
V274550163060	V1648975734C9	V2123242030D1	V26438674BEB9	V27186275AEAD	V281083543BDE
V28186751FB70	V16489758CC3E	V212324212158	V26438675AF30	V27186304A8F0	V281083552A57
V287782577BBF	V16489759DDB7	V2123242213C3	V264386778C22	V27186350906C	V2810835618CC
V287424400163	V164897606A1E	V2123242476F5	V2643867874D5	V27186376C6EA	V281083570945
V28760313EEBB	V164897617B97	V21232425677C	V26438679655C	V27186383128F	V28108358F1B2
V30423351F13A	V164897635885	V21232427446E	V264386825847	V27186412581B	V28108359E03B
V3044402579CB	V164897642C3A	V21232429AD10	V2643868349CE	V27186418F741	V281083605792
V14594633CFBA	V164897653DB3	V212324313880	V264386843D71	V271864326BAB	V28108361461B
V14594634BB05	V164897660F28	V212324320A1B	V264386852CF8	V271864603601	V281083636509
V14594635AA8C	V164897671EA1	V212324331B92	V264386861E63	V271864612788	V2810836411B6
V14594637899E	V16489769F7DF	V212324346F2D	V26438688F71D	V271864621513	V28108367232D

V145946387169	V1648977073C6	V212324357EA4	V26438689E694	V27186463049A	V28108368DBDA
V14594640B029	V16489771624F	V212324364C3F	V26438690628D	V271864647025	V28108369CA53
V14594641A1A0	V16489773415D	V212324375DB6	V264386917304	V271864665337	V281083704EA4
V14594642933B	V1648977435E2	V21232438A541	V26438692419F	V27186468BA49	V281083715FC3
V1459464382B2	V16489775246B	V21232439B4C8	V263072499FB1	V271864702FD9	V281083726D58
V14594644F60D	V1648977616F0	V212324406401	V26438641C37C	V271864764AEF	V281083737CD1
V14594645E784	V164897770779	V212324417588	V256241740EF4	V271864775B66	V28108374086E
V14594646D51F	V16489778FF8E	V212324424713	V256241884750	V27186478A391	V2810837519E7
V14594647C496	V16489779EE07	V21232443569A	V25624202C9AE	V27186479B218	V281083762B7C
V145946483C61	V16489780F00E	V212324442225	V2630724776CF	V27186480AC11	V281083773AF5
V145946492DE8	V16489781E187	V2123244533AC	V263072501BA8	V270020399AFE	V28108379D38B
V14594650A9F1	V16489783C295	V2123244710BE	V2630725897E0	V270020404A37	V28108380CD82
V14594651B878	V164897398967	V21232448E849	V2630726212D2	V270020415BBE	V28108381DC0B
V145946528AE3	V164897450E03	V21232449F9C0	V26307311379D	V270020426925	V28108382EE90
V145946539B6A	V16489768E656	V212324507DD9	V263073255BD1	V2700204378AC	V28108383FF19
V14594654EFD5	V1648977250D4	V212324516C50	V263073660E2A	V270020451D9A	V28108386A8B4
V14594655FE5C	V16489782D31C	V212324525ECB	V26438622A537	V270020462F01	V28108387B93D
V14594656CCC7	V16489762490C	V212324534F42	V26438626E313	V270020473E88	V2810838841CA
V14594657DD4E	V186536004ABF	V212324543BFD	V26438627F29A	V27002048C67F	V281083895043
V1459465825B9	V186536062F89	V212324552A74	V26438639023C	V27002049D7F6	V28108391C5D3
V145946593430	V186536073E00	V2120413623D4	V264386548D09	V2700205053EF	V28108392F748
V145946608399	V18653618DF2F	V21250753A2C8	V264386559C80	V270020514266	V28108393E6C1
V145946619210	V186536216886	V211975756D9A	V26438656AE1B	V2700205270FD	V28108394927E
V14594662A08B	V186536225A1D	V212093688A25	V26438672DB8F	V270020536174	V2810839583F7
V14594663B102	V1865363060D7	V22549676DA91	V264386769DAB	V270020550442	V28108396B16C
V14594664C5BD	V186536371468	V22549677CB18	V264386807B55	V2700205636D9	V281083985812
V14594665D434	V18653638EC9F	V2254967833EF	V264386816ADC	V270020572750	V28108399499B
V14594666E6AF	V186536402DDF	V225496792266	V264386870FEA	V27002058DFA7	V281084008F47
V14594667F726	V186536420ECD	V225496803C6F	V2649421014B0	V2718645981A8	V28108402AC55
V145946680FD1	V186536431F44	V225496812DE6	V264942110539	V26970417905D	V28108403BDDC
V145946691E58	V18653653069C	V225496821F7D	V264942167186	V26970432F440	V28108404C963
V145946709A41	V1865365563AA	V225496830EF4	V26534359FC4E	V26970433E5C9	V28108405D8EA
V145946718BC8	V1865365740B8	V225496847A4B	V265343604BE7	V269704349176	V28108407FBF8
V14594672B953	V186536632CF4	V225496856BC2	V265343615A6E	V2697043580FF	V28108408030F
V14594673A8DA	V186536667B59	V225496865959	V2653436268F5	V26970436B264	V281084091286
V14594674DC65	V186536689227	V2254968748D0	V26534363797C	V26970437A3ED	V28108410969F
V14594675CDEC	V1865368195F6	V22549688B027	V265343640DC3	V269704385B1A	V281084118716
V14594676FF77	V18653683B6E4	V22549689A1AE	V265343651C4A	V269704394A93	V28108412B58D
V14594677EEFE	V18653685D3D2	V2254969025B7	V265343662ED1	V269704409A5A	V28108413A404
V145946781609	V186536909DA7	V22549691343E	V26308181E7C4	V269704418BD3	V28108415C132
V145946790780	V18653692BEB5	V2254969206A5	V26308182D55F	V26970442B948	V28108416F3A9

V145946801989	V18653694DB83	V22549693172C	V26308183C4D6	V26970443A8C1	V28108417E220
V145946810800	V1865370547CE	V225496946393	V26308184B069	V26970444DC7E	V281084181AD7
V145946823A9B	V186537067555	V22549695721A	V26308185A1E0	V26970445CDF7	V28108420BCF7
V145946832B12	V1865370764DC	V225496964081	V26308186937B	V26970446FF6C	V28108421AD7E
V145946845FAD	V1865371885F3	V225496975108	V2630818782F2	V26970447EEE5	V281084229FE5
V145946854E24	V186537553976	V22549698A9FF	V263081887A05	V269704481612	V281084238E6C
V145946867CBF	V186537560BED	V22549699B876	V263081896B8C	V26970449079B	V28108424FAD3
V145946898448	V186537571A64	V22549700A873	V26308190EF95	V269704508382	V28108426D9C1
V145946900051	V18653758E293	V22549701B9FA	V26308191FE1C	V26970451920B	V2810842830BF
V1459469111D8	V18653759F31A	V225497028B61	V26308192CC87	V26970452A090	V281084292136
V1459469332CA	V1865376044B3	V225497039AE8	V26308193DD0E	V26970453B119	V28108430A52F
V145946944675	V18653761553A	V22549704EE57	V26308195B838	V26970455D42F	V28108431B4A6
V145946966567	V1865376267A1	V22549705FFDE	V263081968AA3	V26970456E6B4	V28108432863D
V1459469774EE	V186537637628	V22549706CD45	V263081979B2A	V26970457F73D	V2810843397B4
V145946988C19	V186537640297	V22549707DCCC	V2630819863DD	V269704580FCA	V28108434E30B
V145946999D90	V18653765131E	V22549708243B	V263081997254	V26970460A9EA	V28108450F1FF
V145947008D95	V186537662185	V2254970935B2	V26308200D7E9	V26970461B863	V28108452D2ED
V145947019C1C	V18653767300C	V22549710B1AB	V26308201C660	V269704628AF8	V28108453C364
V14594702AE87	V18653768C8FB	V22549711A022	V26308202F4FB	V269704639B71	V28108454B7DB
V14594703BFOE	V18653769D972	V2254971292B9	V26308203E572	V26970464EFCE	V28108455A652
V14594704CBB1	V186537705D6B	V225497138330	V269002045D1B	V26970465FE47	V2810845694C9
V14594705DA38	V186537714CE2	V22549714F78F	V269002054C92	V26970466CCDC	V281084578540
V14594707F92A	V186537727E79	V226593811362	V269002067E09	V26970467DD55	V281084587DB7
V1459470801DD	V186537736FF0	V2265938444CF	V26308194A9B1	V2697046825A2	V281084596C3E
V145947091054	V186537741B4F	V2265938667DD	V269002076F80	V26970469342B	V28108460DB97
V14594710944D	V186537750AC6	V226593888EA3	V269002089777	V26970470B032	V28108461CA1E
V14594712B75F	V18653776385D	V226593901B33	V2690020986FE	V26970471A1BB	V28108462F885
V145946922343	V1865377729D4	V226593910ABA	V2690021002E7	V269704729320	V28108463E90C
V1459471185C4	V18653778D123	V226593923821	V26900211136E	V2697047382A9	V281084649DB3
V14594714D269	V18653779C0AA	V23165448A2FA	V2690021221F5	V26970475E79F	V281084658C3A
V14594715C3E0	V18653780DEA3	V23165449B373	V2690021444C3	V26970476D504	V28186662B95F
V14594717E0F2	V18653781CF2A	V23165450376A	V2690021667D1	V26970477C48D	V28186663A8D6
V145947181805	V18653782FDB1	V2316545126E3	V269002177658	V269704783C7A	V28186664DC69
V14594720BE25	V18653783EC38	V231654521478	V269002188EAF	V2697048033FA	V28186665CDE0
V145947229D37	V186537849887	V2316545305F1	V269002199F26	V269704812273	V28186666FF7B
V145947238CBE	V18653785890E	V23165454714E	V269002213906	V2697048210E8	V28186667EEF2
V14594724F801	V18653786BB95	V2316545560C7	V269002220B9D	V269704830161	V281866681605
V14594725E988	V18653787AA1C	V23165456525C	V269002231A14	V2697048475DE	V28186669078C
V14594727CA9A	V1865378852EB	V2316545743D5	V269002246EAB	V269704856457	V281866708395
V14594728326D	V186537894362	V23165458BB22	V269002257F22	V2697048656CC	V281083627480
V1459472923E4	V18653790C77B	V23165459AAAB	V269002264DB9	V269704874745	V2810836632A4

V14594730A7FD	V18653791D6F2	V231654601D02	V269002275C30	V26970489AE3B	V281084019ECE
V145947339566	V18653792E469	V22965073EBAD	V26900228A4C7	V269704913BAB	V28108427C848
V14594734E1D9	V186537177D04	V229650749F12	V26900229B54E	V269704920930	V28108435F282
V14594735F050	V1865375428FF	V229650758E9B	V269002303157	V2697049318B9	V28108436C019
V14594736C2CB	V1838811612B2	V22965076BC00	V2690023120DE	V269704946C06	V28108437D190
V14594737D342	V18388117033B	V22965077AD89	V2690023303CC	V269704957D8F	V281084382967
V145947382BB5	V18388118FBCC	V22965078557E	V269002347773	V269704964F14	V2810843938EE
V145947393A3C	V18388119EA45	V2296507944F7	V2690023566FA	V269704975E9D	V28108440E827
V14594742C9E7	V183881205DEC	V229650805AFE	V269002365461	V26970498A66A	V28108441F9AE
V14594743D86E	V183881214C65	V2296508279EC	V2690023745E8	V26970499B7E3	V28108442CB35
V14594745BD58	V183881227EFE	V229650836865	V26900238BD1F	V26970500A7E6	V28108443DABC
V145947468FC3	V18435077DD85	V229650841CDA	V26900239AC96	V26970501B66F	V28108444AE03
V145947479E4A	V184350846CD6	V229650850D53	V269002407C5F	V2697050284F4	V28108445BF8A
V1459474866BD	V18435088A6BA	V229650863FC8	V269002416DD6	V26970503957D	V281084468D11
V145947497734	V18435089B733	V229650872E41	V269002425F4D	V26970504E1C2	V281084479C98
V14594750F32D	V18435090332A	V22965088D6B6	V269002434EC4	V26970505F04B	V28108448646F
V14594751E2A4	V1843509122A3	V22965089C73F	V269002443A7B	V26970506C2D0	V2810844975E6
V14594752D03F	V184350921038	V229650904326	V269002452BF2	V26970507D359	V28186671921C
V14594753C1B6	V1843509301B1	V2296509152AF	V2690024708E0	V269705082BAE	V28186674C5B1
V14594754B509	V184350956487	V229650926034	V26900248F017	V269705093A27	V28186675D438
V14594755A480	V18435096561C	V2296509371BD	V26900249E19E	V26970510BE3E	V28186676E6A3
V14594756961B	V184350974795	V229650940502	V269002506587	V26970511AFB7	V28186677F72A
V145947578792	V18435099AEEB	V22965095148B	V269002524695	V269705129D2C	V281866780FDD
V145947587F65	V18435100BEEE	V229650962610	V26900253571C	V26970514F81A	V281866791E54
V145947596EEC	V184351029DFC	V229650973799	V2690025423A3	V26970515E993	V28186680005D
V14594760D945	V184351038C75	V22965098CF6E	V26900255322A	V26970516DB08	V2818668111D4
V14594761C8CC	V18435104F8CA	V22965099DEE7	V2690025600B1	V269705183276	V28186682234F
V14594762FA57	V18435105E943	V22965100CEE2	V269002571138	V2697051923FF	V2818668332C6
V14594763EBDE	V18435106DBD8	V22965101DF6B	V26900258E9CF	V269705209456	V281866844679
V145947649F61	V18435107CA51	V22965102EDF0	V26900259F846	V2697052185DF	V2818668557F0
V145947658EE8	V1843510832A6	V22965103FC79	V269002615E66	V26970522B744	V28186686656B
V14594766BC73	V18435110A736	V2296510488C6	V269002626CFD	V26970523A6CD	V2818668774E2
V14594768550D	V18435111B6BF	V22965105994F	V269002637D74	V26970524D272	V281866888C15
V145947694484	V18435094750E	V22965106ABD4	V2690026409CB	V26970525C3FB	V281866899D9C
V14594770C09D	V18435098BF62	V22965107BA5D	V269002651842	V26970526F160	V281866901985
V14594771D114	V19350204C165	V2296510842AA	V269002662AD9	V27002059CE2E	V28186691080C
V14594772E38F	V19350205D0EC	V229651095323	V269002673B50	V270020607987	V281866923A97
V14594773F206	V19350206E277	V22965110D73A	V26900268C3A7	V270020625A95	V281866932B1E
V1459477486B9	V193502080B09	V22965111C6B3	V26900269D22E	V270020634B1C	V281866945FA1
V145947759730	V193502091A80	V232185192039	V269412046CB0	V270020652E2A	V281866954E28
V14594776A5AB	V193502109E99	V232185209790	V269412057D39	V270020661CB1	V281866967CB3

V14594777B422	V193502118F10	V23218524D1B4	V269412064FA2	V270020670D38	V281866976D3A
V145947784CD5	V19350212BD8B	V23218536EB7E	V269412075E2B	V27002068F5CF	V2818669895CD
V145947795D5C	V19350213AC02	V232185391389	V26941208A6DC	V27002069E446	V281866998444
V145947804355	V19350214D8BD	V23218541D2C9	V26941209B755	V27002070605F	V2818670185C8
V1459478152DC	V19350215C934	V23218543F1DB	V26941210334C	V2700207171D6	V28186702B753
V145947826047	V19350216FBAF	V23218550DA98	V2694121122C5	V27002072434D	V28186704D265
V1459478371CE	V19350207F3FE	V23218553E803	V26941212105E	V2700207352C4	V28186705C3EC
V145947840571	V19350217EA26	V23218556BFAE	V2694121301D7	V2700207537F2	V28186706F177
V1459478514F8	V193344076C53	V2321855856D0	V269412147568	V270020760569	V28186707E0FE
V1459478737EA	V19334409852D	V23218571F8A1	V2694121564E1	V2700207714E0	V281867081809
V14594788CF1D	V193344100134	V23218573DBB3	V26941216567A	V27002078EC17	V281867108D99
V14594789DE94	V1933441110BD	V23218575BE85	V2694121747F3	V27002079FD9E	V28186712AE8B
V145947936816	V193344122226	V232185860FD6	V26941218BF04	V27002080E397	V28186713BF02
V145947905A8D	V1933441333AF	V23218589F721	V26941219AE8D	V27002081F21E	V28186714CBBD
V145947914B04	V193344155699	V232185907338	V269412201924	V27002082C085	V28186715DA34
V14594792799F	V193344166402	V2321859162B1	V269412223A36	V27002083D10C	V28186716E8AF
V145947941CA9	V19334417758B	V23218608C70C	V269412232BBF	V27002084A5B3	V2818671801D1
V145947950D20	V193344199CF5	V23218609D685	V269412245F00	V27002085B43A	V281867191058
V145947963FBB	V193344202B5C	V232186114315	V269412254E89	V2700208686A1	V28186721B678
V145947972E32	V193344213AD5	V23218612718E	V269412267C12	V270020879728	V2818672284E3
V14594798D6C5	V19334422084E	V232186270C4B	V269412276D9B	V270020897E56	V28186723956A
V14594799C74C	V193344246D78	V23218628F4BC	V26941228956C	V27002090FA4F	V28186724E1D5
V14594800C752	V193344257CF1	V2321863170A5	V2694122984E5	V27002091EBC6	V28186725F05C
V14594801D6DB	V193344264E6A	V23218632423E	V269412311175	V27002092D95D	V28186726C2C7
V14594802E440	V193344275FE3	V232186413DAD	V2694123223EE	V27002093C8D4	V28186727D34E
V14594803F5C9	V19334428A714	V232186464912	V269412333267	V27002094BC6B	V281867282BB9
V145948048176	V19334429B69D	V23218647589B	V269412355751	V27002095ADE2	V281867293A30
V1459480590FF	V193344303284	V232186556251	V2694123665CA	V270020969F79	V28186730BE29
V14594806A264	V193344321196	V2321865650CA	V269412377443	V270020978EF0	V28186731AFA0
V14594807B3ED	V19334433001F	V23218658B9B4	V269412388CB4	V270020987607	V281867329D3B
V145948084B1A	V1933443474A0	V23218659A83D	V269412399D3D	V27002099678E	V281867338CB2
V145948095A93	V193344356529	V232186601F94	V26941240DF4	V2718644005B1	V28186734F80D
V14594810DE8A	V19334437463B	V232186587CB8	V269412415C7D	V26970395F18A	V28186735E984
V14594811CF03	V19334438BECC	V232186431EBF	V269412426EE6	V269704591E43	V28186736DB1F
V14594812FD98	V19334439AF45	V232186574143	V269412437F6F	V26970474F616	V28186737CA96
V14594813EC11	V193344416E05	V23291715FCAE	V269412440BD0	V269704792DF3	V281867383261
V146446853E2D	V193344425C9E	V23291716CE35	V269412451A59	V26970488BF82	V2818673923E8
V146446860CB6	V193344434D17	V23291717DFBC	V2694124628C2	V269704902A22	V28186741E2A8
V146446871D3F	V1933444439A8	V23291718274B	V26941248C1BC	V26970517CA81	V28186742D033
V14644688E5C8	V193344452821	V2329171936C2	V26941249D035	V26970527E0E9	V28186743C1BA
V14644689F441	V193344188D7C	V23291720816B	V26941250542C	V26970528181E	V28186744B505

V1464469161D1	V19334431230D	V2329172190E2	V2694125145A5	V269705290997	V28186745A48C
V1464469342C3	V1933443657B2	V23291722A279	V26941252773E	V269705308D8E	V281867469617
V14644694367C	V193344407F8C	V23291723B3F0	V2694125366B7	V269705319C07	V28186747879E
V1464469527F5	V193508259026	V23291724C74F	V269412541208	V26970532AE9C	V281867487F69
V14644696156E	V19350826A2BD	V23291725D6C6	V269412550381	V26970533BF15	V281867496EE0
V14644698FC10	V193508284BC3	V23291726E45D	V26941256311A	V26970535DA23	V28186750EAF9
V14644699ED99	V193508295A4A	V23291727F5D4	V269412572093	V26970536E8B8	V28186752C9EB
V14644700FD9C	V19350830DE53	V23291823F937	V26941258D864	V26970537F931	V28186753D862
V14644701EC15	V19350831CFDA	V232918248D88	V26941259C9ED	V2697053801C6	V28186755BD54
V14644702DE8E	V19350832FD41	V232918259C01	V269412607E44	V26970539104F	V281867568FCF
V145946369817	V19350833ECC8	V23291826AE9A	V269412634CDF	V26970540C086	V281867579E46
V145946876D36	V1935083589FE	V23291827BF13	V269412643860	V26970541D10F	V2818675866B1
V1459468895C1	V19350836BB65	V2329182847E4	V2694126529E9	V26970542E394	V281867597738
V1459469557FC	V19350837AAEC	V23291829566D	V269412661B72	V26970543F21D	V28186760C091
V14594706E8A3	V19350838521B	V23291831C3FD	V269412670AFB	V26970545972B	V28186762E383
V14594713A6D6	V193508394392	V23291832F166	V26941268F20C	V26970546A5B0	V28186763F20A
V14594719098C	V19350842B049	V23291833E0EF	V26941270679C	V26970547B439	V2818676486B5
V14594721AFAC	V19350843A1C0	V232918349450	V269412717615	V269705495D47	V28186765973C
V14594726DB13	V19350844D57F	V2329183585D9	V26941272448E	V26970550D95E	V28186767B42E
V1459473284EF	V19350845C4F6	V23291836B742	V269412735507	V26970551C8D7	V281867684CD9
V14594740EAF5	V19350846F66D	V23291837A6CB	V2694127421B8	V270020440C13	V281867695D50
V14594744ACD1	V193508481F13	V232918394FB5	V269412753031	V2700205415CB	V28186770D949
V14594767ADFA	V193508490E9A	V232918409F7C	V2694127602AA	V270020643FA3	V28186771C8C0
V146446907058	V193508508A83	V232918418EF5	V269412771323	V27002074267B	V28186772FA5B
V14594716F17B	V193508519B0A	V23291842BC6E	V26941278EBD4	V270020886FDF	V28186773EBD2
V14594731B674	V19350827B334	V23291843ADE7	V26941279FA5D	V27026964C7D9	V281867749F6D
V14644692534A	V193508349877	V23291844D958	V26941280E454	V27026966E4CB	V281867758EE4
V1464469704E7	V198232381955	V23291845C8D1	V26941281F5DD	V27026967F542	V28186720A7F1
V14847211D01F	V1982323908DC	V23291846FA4A	V26941282C746	V270269680DB5	V281083848BA6
V14847212E284	V19823240D815	V23291847EBC3	V26941283D6CF	V270269691C3C	V281867009441
V14847213F30D	V19823242FB07	V232918481334	V26941285B3F9	V2702697189AC	V28186717F926
V1484721487B2	V198232458FB8	V2329184902BD	V269412868162	V27026973AABE	V28186754ACDD
V148472184DDE	V19823246BD23	V2329185086A4	V2694128790EB	V2702698238FF	V28108406EA71
V148472195C57	V19823247ACAA	V23218514FBDC	V26941288681C	V270269845DC9	V281084190B5E
V14847220EBFE	V1982324945D4	V232187312A79	V269412897995	V270269876F52	V28108451E076
V14847222C8EC	V19823250C1CD	V2321873218E2	V26941290FD8C	V270269900235	V281867119C10
V14847224ADDA	V19350840935B	V23218733096B	V26941291EC05	V2702699330AE	V28186740F321
V14847225BC53	V1935084182D2	V232187347DD4	V26941292DE9E	V270269955598	V28108378C202
V148472279F41	V19350847E7E4	V232187356C5D	V26941293CF17	V270270014401	V281083859A2F
V1484722867B6	V198232449E31	V232187365EC6	V26941294BBA8	V27027002769A	V28108390D45A
V14847229763F	V19823248545D	V23218738B7B8	V26941295AA21	V2702700413AC	V281866618BC4

V14847230F226	V19823241C99C	V23218739A631	V2694129698BA	V270270072137	V28108365003F
V14847231E3AF	V19823243EA8E	V2321874076F8	V269412978933	V27027009C849	V28186673B10E
V14847233C0BD	V20341859CB54	V2321874255EA	V2694129871C4	V270270137ECB	V28186703A6DA
V14847234B402	V203418607CFD	V232187434463	V26941299604D	V27027019D191	V281867090980
V14847235A58B	V203418616D74	V2321874430DC	V269413007048	V270270206638	V28186761D118
V148472369710	V203418625FEF	V232187452155	V2694130161C1	V2702702177B1	V287424499CA2
V148472387E6E	V203418634E66	V2321874613CE	V26941302535A	V270270253195	V2874245018BB
V148472396FE7	V203418643AD9	V232187470247	V2694130342D3	V27027028EA70	V287424510932
V14847240BF2E	V203418652B50	V23291830D274	V26941304366C	V270270325CF2	V287424523BA9
V148472429C3C	V2034186619CB	V232918385E3C	V2694130527E5	V270270334D7B	V287424532A20
V148472438DB5	V203418670842	V23291851972D	V26941306157E	V2702703439C4	V287424545E9F
V14847244F90A	V20341868F0B5	V23291852A5B6	V26941308FC00	V270270370B5F	V287424554F16
V14847245E883	V203418706525	V23291853B43F	V26941309ED89	V27027038F3A8	V287602926B2E
V14847246DA18	V203418724637	V23291854C080	V269413106990	V27027039E221	V287602937AA7
V14847247CB91	V2034187357BE	V23291855D109	V269413117819	V2702704032E8	V287602940E18
V148472483366	V203418742301	V23291856E392	V269413124A82	V270270412361	V287602951F91
V1484724922EF	V203418753288	V23291857F21B	V269413135B0B	V2702704211FA	V287602962D0A
V14847250A6F6	V202859336BF5	V232918580AEC	V269413142FB4	V270270430073	V287602973C83
V14847215963B	V202859350EC3	V232918591B65	V269413153E3D	V2702704657DE	V28760298C474
V14847216A4A0	V202859363C58	V23291860ACCC	V26900220288F	V270270474657	V28760299D5FD
V14847217B529	V20285938D526	V23291861BD45	V269002321245	V27027048BEA0	V28760300C5F8
V14847221FA77	V20285939C4AF	V232918628FDE	V269002461969	V27027049AF29	V28760301D471
V14847223D965	V2028594105EF	V232918639E57	V26900251740E	V270270513AB9	V28760302E6EA
V148472268EC8	V202859423774	V23291864EAE8	V2694122108AD	V2702705319AB	V28760303F763
V148472378699	V2028594326FD	V23291865FB61	V2694123446D8	V270270546D14	V2876030483DC
V14847251B77F	V202859445242	V23291866C9FA	V26941247394B	V270270557C9D	V287603059255
V1484725285E4	V2028594543CB	V23291867D873	V2694130704F7	V270270564E06	V28760306A0CE
V14847253946D	V202859467150	V232918682084	V26900215554A	V270270575F8F	V2876030849B0
V14847254E0D2	V2028594760D9	V23291869310D	V2694123000FC	V27027059B6F1	V287603095839
V14847255F15B	V20285948982E	V232187374F4F	V26941269E385	V270270600158	V28760310DC20
V14847256C3C0	V2028594989A7	V23218748FAB0	V269412616FCD	V2702706110D1	V28760311CDA9
V14847257D249	V202859500DBE	V232920155566	V269412625D56	V2702706333C3	V287603149A04
V148472582ABE	V202859511C37	V2329201667FD	V26941284A270	V27027064477C	V287782566A36
V148472593B37	V202859533F25	V232920177674	V26308180F64D	V2702706556F5	V287782588348
V148472608C9E	V202859544B9A	V23292021392A	V26900213307C	V27027066646E	V28742427210C
V148472619D17	V202859555A13	V232920246E87	V269002604FEF	V2702706775E7	V28742428D9FB
V14847263BE05	V202859566888	V232920264D95	V269858575635	V270270688D10	V287424315DE2
V14847264CABA	V2034187174AC	V23292029B562	V26985858AEC2	V270270699C99	V287424326F79
V14847265DB33	V203418760013	V2329203120F2	V26985859BF4B	V270270701880	V287424337EF0
V14847266E9A8	V20286514AC94	V23292036544D	V2698586008E2	V270270710909	V287424340A4F
V14847267F821	V20286515BD1D	V23292038BD33	V26985861196B	V270270732A1B	V287424351BC6

V14847269115F	V202865168F86	V232920434EE8	V269858622BF0	V270270754F2D	V28742436295D
V148472709546	V202865179E0F	V23292048F03B	V269858633A79	V270270767DB6	V2874243738D4
V1484727184CF	V2028651866F8	V234325341AB0	V269858644EC6	V26970454C5A6	V28742439D1AA
V14847272B654	V20286520C0D8	V234325350B39	V269858655F4F	V269705138CA5	V2874244110EA
V14847273A7DD	V20286521D151	V2343253639A2	V269858677C5D	V26970534CBAA	V2874244333F8
V14847274D362	V20286522E3CA	V23432537282B	V2698586884AA	V2697054486A2	V287424444747
V14847275C2EB	V20341869E13C	V23432538D0DC	V269858699523	V269705484CCE	V2874244556CE
V14847276F070	V202859401466	V23432539C155	V2698587100B3	V27026965D650	V287424466455
V14847277E1F9	V202859522EAC	V23432540119C	V269858723228	V270269709825	V2874244775DC
V14847278190E	V202859341F4A	V234325410015	V2698587323A1	V27026972BB37	V287424488D2B
V148472790887	V20286523F243	V23432542328E	V26985874571E	V27026976FD13	V287424576C04
V14847280168E	V202865259775	V234325432307	V269858754697	V270269988E7D	V2874245894F3
V148472810707	V202865197771	V2343254457B8	V26985876740C	V270270456545	V28742459857A
V14847282359C	V2028652486FC	V234325454631	V269858789D72	V270270502B30	V28742461235A
V148472832415	V202690264F12	V2343254674AA	V269858798CFB	V270270520822	V2874246211C1
V1484728450AA	V202690275E9B	V234325476523	V2698588092F2	V27027058A778	V287424630048
V1484728673B8	V20269028A66C	V230945757BC7	V26985881837B	V27027062224A	V2874246474F7
V148472876231	V20269029B7E5	V23094576495C	V26985882B1E0	V270270723B92	V28742465657E
V148472889AC6	V2026903033FC	V23094580AFA2	V26985883A069	V270270745EA4	V2874246657E5
V148472898B4F	V202690312275	V23094584E986	V26985885C55F	V2702707894C8	V28742480A8C3
V148472900F56	V2026903210EE	V23094586CA94	V26985886F7C4	V270270798541	V28742481B94A
V148472911EDF	V2026903475D8	V230945893263	V26985887E64D	V270270809B48	V287424839A58
V148472922C44	V202690356451	V23094590B67A	V269858881EBA	V270270818AC1	V28742485FF6E
V148472933DCD	V2026903656CA	V230945929568	V26985892A838	V27027082B85A	V28742486CDF5
V148472944972	V202690374743	V2309459384E1	V26985893B9B1	V27027083A9D3	V28742487DC7C
V1484729558FB	V20269038BFB4	V23094594F05E	V26985894CD0E	V27027084DD6C	V28742488248B
V148472966A60	V20269039AE3D	V230945983A32	V26985895DC87	V27027085CCE5	V287424893502
V148472977BE9	V202690407EF4	V230946008E06	V26985896EE1C	V27027087EFF7	V28742490B11B
V14847298831E	V20870948B58B	V23094603BC9D	V26985897FF95	V270270881700	V28742491A092
V148472999297	V20870949A402	V23094604C822	V269858980762	V270270890689	V287424938380
V148473008292	V20870950201B	V2309461097DE	V2698589916EB	V270270908290	V28742494F73F
V14847302A180	V208709513192	V23094612B4CC	V2698590006EE	V270270919319	V28742497C5A4
V14847303B009	V208709520309	V23094614D1FA	V269859011767	V27027092A182	V287424983D53
V14847304C4B6	V208709531280	V23094615C073	V2698590225FC	V27027093B00B	V287424992CDA
V14847305D53F	V2087095577B6	V23094616F2E8	V2698590440CA	V27027094C4B4	V287425003CDF
V14847306E7A4	V20870956452D	V230946229EA4	V269859055143	V27027095D53D	V287603158B8D
V14847307F62D	V20870958AC53	V23094624FB92	V2698590663D8	V27027096E7A6	V28760316B916
V148473080EDA	V20870959BDDA	V2309462831FE	V269859077251	V27027097F62F	V28760317A89F
V148472854123	V208709600A73	V23094630A46E	V269859088AA6	V270270980ED8	V287603185068
V14847301931B	V208709611BFA	V2309463396F5	V269859099B2F	V270270991F51	V2876031941E1
V148473091F53	V208709622961	V23094634E24A	V269859101F36	V270271000F54	V28760320F648

V148473109B4A	V2087096338E8	V23094637D0D1	V269859110EBF	V270271011EDD	V28760321E7C1
V148473118AC3	V208709644C57	V2309463939AF	V269859132DAD	V270271022C46	V28760322D55A
V14847312B858	V208709655DDE	V23094641F8EF	V269859145912	V270271033DCF	V28760323C4D3
V14847313A9D1	V208709677ECC	V23094643DBFD	V26985915489B	V270271044970	V28760324B06C
V14847314DD6E	V20870968863B	V23094645BECB	V269859167A00	V2702710558F9	V28760325A1E5
V14847315CCE7	V2087096997B2	V230946468C50	V269859176B89	V270271066A62	V2876032782F7
V14847241AEA7	V2087097013AB	V23094650F0BE	V26985920355E	V270271077BEB	V287603287A00
V1484726800D6	V208709710222	V23094652D3AC	V2698592124D7	V27027108831C	V287603296B89
V149432961CA7	V2087097230B9	V23094655A713	V26985922164C	V270271099295	V28760330EF90
V14943298F5D9	V208709732130	V230946569588	V2698592307C5	V27027110168C	V28760331FE19
V14943304B271	V20870974558F	V230946587CF6	V26985924737A	V270271110705	V28760332CC82
V14943305A3F8	V20870976769D	V23094660DAD6	V2698592562F3	V27027112359E	V28760333DD0B
V149433069163	V208709798E6A	V23094668569E	V2698592741E1	V270271132417	V28760334A9B4
V1494330780EA	V208709809063	V23094670C30E	V26985928B916	V2702711450A8	V287603368AA6
V14943308781D	V2087098181EA	V2309467594A3	V26985929A89F	V27186667F706	V287603379B2F
V149433096994	V20870982B371	V23094677B7B1	V269859302C86	V271866709A61	V287603397251
V1494331688BB	V20870983A2F8	V230946784F46	V269859313D0F	V27186675CDCC	V28760340A298
V149433179932	V20870984D647	V23094681514F	V269859320F94	V27186676FF57	V28760341B311
V1494331861C5	V20870985C7CE	V23094683725D	V269859331E1D	V27186677EEDE	V287603439003
V14943319704C	V20870986F555	V230946873479	V27026635E22F	V271866781629	V28760344E4BC
V14943320C7E5	V20870987E4DC	V23094689DD07	V27026636D0B4	V271866810820	V28760345F535
V14943327B35A	V208709890DA2	V230946950EB3	V27026637C13D	V271866845F8D	V28760346C7AE
V149433284BAD	V2087099089BB	V23094700D4DA	V2702663839CA	V2718668895E1	V28760347D627
V149433295A24	V20870993BB20	V23094702F7C8	V270266392843	V2718669111F8	V287603493F59
V14943330DE3D	V20870994CF9F	V23094703E641	V27026640F88A	V271866999DB0	V28760351AAC9
V14943331CFB4	V20870995DE16	V230947058377	V27026641E903	V2718671185E4	V287424702B0B
V14943332FD2F	V20870996EC8D	V23094706B1EC	V27026642DB98	V27186714D249	V287424713A82
V14943333ECA6	V2087099805F3	V230947085892	V27026643CA11	V27186716F15B	V287424731990
V149433349819	V20871001CF8F	V23094710CD02	V27026644BEAE	V2718671909AC	V287424746D2F
V14943342B027	V20871002FD14	V23094712EE10	V27026645AF27	V271867238C9E	V287424757CA6
V14943343A1AE	V20871003EC9D	V230947148B26	V270266469DBC	V27186725E9A8	V287424764E3D
V14943344D511	V20870954663F	V23219149215B	V270266478C35	V27186727CABA	V287424775FB4
V14943345C498	V2087095754A4	V23219150A542	V27026649654B	V271867339546	V28760312FF32
V14943346F603	V208709666F45	V23094716A834	V27026650E152	V27186736C2EB	V28742429C872
V14943347E78A	V208709754406	V23094718414A	V27026651F0DB	V27186737D362	V287424567D8D
V14943353B876	V208709776714	V2309472793D5	V27026652C240	V271867382B95	V28742467466C
V14943354CCC9	V208709789FE3	V23094730FEB2	V27026654A776	V27186740EAD5	V28742469AF12
V14943355DD40	V208709881C2B	V23094732DDA0	V27026655B6FF	V27186743D84E	V28742478A743
V14943359172C	V208709919832	V2309473872FA	V270266568464	V271867468FE3	V28742479B6CA
V14943360A085	V20870992AAA9	V23094741A233	V2702665795ED	V271867479E6A	V287424828BD1
V14943361B10C	V20870997FD04	V23094744F59E	V270266586D1A	V27186755A4A0	V28742484EEE7

V149433682CCD	V20871000DE06	V23094745E417	V270266597C93	V27186766BC53	V28742496D42D
V149433729A4F	V208710049822	V230945828CB0	V27026660CB3A	V27186768552D	V28760307B147
V14943379249C	V2087100589AB	V230946649CF2	V27026661DAB3	V27186772E3AF	V28760342818A
V149433821987	V20871006BB30	V23094726825C	V27026663F9A1	V271867759710	V287603482ED0
V14943388B6DD	V20871007AAB9	V23094734B896	V270266648D1E	V271867784CF5	V28760350BB40
V14943389A754	V2087100943C7	V23094662F9C4	V270266659C97	V27186788CF3D	V287603529852
V14943390234D	V20871010C7DE	V230946936B85	V27026666AE0C	V271867914B24	V287424304C6B
V14943392005F	V20871011D657	V23094698D556	V27026667BF85	V271867936836	V28742438C023
V1494339311D6	V20871012E4CC	V230947369B84	V270266684772	V271868048156	V287424422271
V149433946569	V2087101481FA	V2430739588C2	V2702666956FB	V2718680590DF	V287424929209
V1494339574E0	V208710159073	V24307396BA59	V27026670D2E2	V27186806A244	V28742495E6B6
V1494340169D9	V20871016A2E8	V24307397ABD0	V27026671C36B	V27186807B3CD	V2876033863D8
V149434025B42	V20871017B361	V243073985327	V27026672F1F0	V271868084B3A	V2874246032D3
V149434034ACB	V208710184B96	V2430739942AE	V27026673E079	V27186810DEAA	V28760326937E
V149434043E74	V208710195A1F	V243074008472	V2702667494C6	V27186811CF23	V28742468BE9B
V14943356EFDB	V20871020EDB6	V2430740195FB	V27026675854F	V27186812FDB8	V28760335B83D
V14943357FE52	V20871021FC3F	V24307402A760	V27026676B7D4	V27186814988E	V290846589EE5
V14943371A8D4	V20871022CEA4	V24307403B6E9	V27026677A65D	V27186816BB9C	V290846598F6C
V149433783515	V20871023DF2D	V24307404C256	V270266785EAA	V2718681852E2	V2908466038C5
V149433803A95	V20871024AB92	V24307405D3DF	V270266794F23	V27186820F4C2	V29084661294C
V149433812B1C	V20871008524E	V24307406E144	V27026680512A	V27186822D7D0	V290846621BD7
V149433358990	V20871013F545	V24307407F0CD	V2702668140A3	V27186823C659	V290846647EE1
V149433693D44	V20870999147A	V24307408083A	V26942573FCCF	V27186827807D	V290846656F68
V1494335806A5	V21037940FD7F	V2430740919B3	V269425748870	V27186828788A	V29084670211D
V149433628397	V21037941ECF6	V243074109DAA	V2694257599F9	V27186830ED1A	V290846713094
V14943370B95D	V21037942DE6D	V243074118C23	V26942576AB62	V27002061680E	V29084672020F
V1494339132C4	V21037943CFE4	V24307412BEB8	V26942577BAEB	V27026975CF88	V290846746739
V15016705323C	V21037944BB5B	V24307413AF31	V26942578421C	V2702704474CC	V2908467576B0
V1501670600A7	V21037945AAD2	V24307414DBE8	V269425795395	V27027086FE7E	V29084680A2D5
V15016707112E	V210379469849	V24417316630C	V269425804D9C	V2718669774CE	V29084681B35C
V150167143A6D	V2103794789C0	V244173177285	V269425815C15	V271867229D17	V2908468281C7
V150167152BE4	V210379487137	V244173188A72	V269425826E8E	V27186728324D	V29084683904E
V15016716197F	V2103794960BE	V244173199BFB	V269425837F07	V27186748669D	V29084684E4F1
V1501671708F6	V21037950E4A7	V244173202C52	V269425840BB8	V27186761C8EC	V29084686C7E3
V15016718F001	V21037951F52E	V244173213DD8	V269425851A31	V271868095AB3	V29084687D66A
V150167205621	V21062671C45A	V244173231EC9	V2694258628AA	V27186821E54B	V290846882E9D
V15016727229E	V210626962AF5	V244173246A76	V269425873923	V27186824B2E6	V290846893F14
V15016728DA69	V210627278508	V244173257BFF	V26942588C1D4	V27186825A36F	V290846665DF3
V15016729CBE0	V210627287DFE	V244173264964	V26942589D05D	V2718682691F4	V29084668B48D
V150167304FF9	V21062730E86F	V2441732758ED	V269425905444	V271868296903	V290846731386
V150167411378	V21062731F9E6	V24417329B193	V2694259145CD	V27186831FC93	V29084676442B

V1501674221E3	V210627269481	V24417330358A	V269425927756	V27186832CE08	V2908467755A2
V150167488EB9	V21194336CB75	V244173220F40	V2694259366DF	V27186833DF81	V29084678AD55
V150167499F30	V21194337DAFC	V24417328A01A	V269425941260	V27186834AB3E	V29084679BCDC
V150167510AA0	V21194338220B	V2615487273BF	V2694259503E9	V27186835BAB7	V29084690BB0D
V15016752383B	V21194341F2C2	V261548741689	V269425963172	V27186836882C	V29084691AA84
V1501675986E8	V21194342C059	V26154876359B	V2694259720FB	V2718683799A5	V29084692981F
V150167603141	V21194343D1D0	V26154878DCE5	V26942598D80C	V271868386152	V290846938996
V150167665477	V21194344A56F	V26154880D365	V26942599C985	V2718683970DB	V29084694FD29
V150167764DAF	V21194346867D	V2615488584C8	V269426006C38	V27186840A012	V29084695ECA0
V150167775C26	V2119434797F4	V26154886B653	V269426017DB1	V27186841B19B	V29084696DE3B
V15016779B558	V211943486F03	V261548894EA4	V269426024F2A	V271868428300	V29084697CFB2
V15016791A300	V211943497E8A	V26154892E9AF	V269426035EA3	V271868439289	V290846983745
V15016792919B	V21194350FA93	V261548959D10	V269426042A1C	V27186844E636	V2908469926CC
V150167938012	V21194351EB1A	V2615490156F0	V269426053B95	V27186845F7BF	V2908470036C9
V15016794F4AD	V21194352D981	V2615490375E2	V26942606090E	V27186846C524	V290847012740
V150167992F48	V21194353C808	V2615490510D4	V269426071887	V27454956D7A5	V290847030452
V1501680578FB	V21194354BCB7	V261549105EA1	V26942608E070	V274549592F52	V2908470470ED
V150168075BE9	V21194355AD3E	V260660385DD6	V26942609F1F9	V2745496098FB	V290847056164
V150167024683	V211943578E2C	V260660394C5F	V2694261075E0	V274549618972	V2908470653FF
V150167263317	V2119435876DB	V260660409C96	V269426116469	V27454962BBE9	V290846576612
V150167983EC1	V211943596752	V260660418D1F	V2694261256F2	V27454963AA60	V29084685F578
V150168046972	V21194360D0FB	V26066042BF84	V26942613477B	V27454964DEDF	V290846674C7A
V15110395C9F4	V21194361C172	V26066043AE0D	V2694261433C4	V27454965CF56	V290846630A5E
V15110396FB6F	V2119436496DF	V26066044DAB2	V26942615224D	V27454966FDCD	V29084669A504
V15110397EAE6	V211943658756	V26066045CB3B	V2694261610D6	V2745496814B3	V2908470215DB
V151103981211	V21194366B5CD	V26066046F9A0	V26942617015F	V27454969053A	V294156288E9E
V151103990398	V211943685CB3	V26066047E829	V269858666DD4	V274549708123	V29415632381C
V15110401D4CD	V211943694D3A	V2606604810DE	V26985870113A	V2745497190AA	V294156345D2A
V15110400C544	V21194370C923	V260660490157	V26985884D4D6	V27454972A231	V294156376FB1
V15110403F7DF	V21194371D8AA	V26066050854E	V269858890F33	V27454973B3B8	V294157060E8C
V151104048360	V21194372EA31	V2606605194C7	V269858908B2A	V27454974C707	V29415777520D
V15110407B1FB	V21194373FB88	V26066052A65C	V269858919AA3	V27454975D68E	V29415849DBDC
V15110408490C	V21194376AC15	V26066053B7D5	V269859033475	V27454976E415	V29415892D577
V151104095885	V21194377BD9C	V26066054C36A	V269859123C24	V27454977F59C	V29415918EE31
V15110410DC9C	V211975500987	V26066055D2E3	V269859346AA2	V274549780D6B	V294159498100
V15110411CD15	V21197551180E	V26066056E078	V2698593649B0	V274549791CE2	V2941599820F1
V15110412FF8E	V211975522A95	V26066057F1F1	V269859375839	V2745498002EB	V294160158C07
V15110413EE07	V211975544FA3	V260660580906	V26985938AOCE	V274549811362	V29416044E336
V151104149AB8	V211975555E2A	V26066059188F	V26985939B147	V2745498221F9	V29416074C95E
V151104158B31	V211975566CB1	V26066060AF26	V26985940618E	V274549833070	V29416120AB1E
V15110416B9AA	V211975577D38	V26066061BEAF	V269859417007	V2745498444CF	V294161973B09

V15110417A823	V2119755885CF	V260660628C34	V26985942429C	V274549855546	V2941635053AE
V1511041850D4	V211975599446	V260660639DBD	V269859435315	V2745498667DD	V294163514227
V15110419415D	V211975613266	V26066064E902	V2698594427AA	V274549877654	V294163735285
V15110420F6F4	V2119756200FD	V26066065F88B	V269859453623	V274549901B33	V294163897E17
V15110421E77D	V211975631174	V26066066CA10	V2698594604B8	V274549910ABA	V29416494302F
V15110422D5E6	V2119756465CB	V26066067DB99	V269859471531	V274549923821	V294165186E5F
V15110423C46F	V211975675750	V26066068236E	V26985948EDC6	V2745499329A8	V294167040853
V15110425A159	V21197568AFA7	V2606606932E7	V26985949FC4F	V274549945D17	V29416781913E
V1511042693C2	V21197569BE2E	V26066070B6FE	V269859507856	V274549954C9E	V29416782A3A5
V15110427824B	V211975703A37	V26066071A777	V2698595169DF	V27454998977B	V29416783B22C
V151104287ABC	V211975712BBE	V2606607295EC	V269859525B44	V2745499986F2	V2941856110D4
V151104296B35	V211975721925	V260660738465	V269859534ACD	V274550004C8E	V294185644779
V15110430EF2C	V2119757308AC	V26066074F0DA	V269859543E72	V274550015D07	V2941856556F0
V15110432CC3E	V211975747C13	V26066075E153	V269859552FFB	V274550026F9C	V2941856775E2
V15110433DDB7	V211975765F01	V26066076D3C8	V269859561D60	V274550037E15	V294185688D15
V15110434A908	V211975774E88	V26066077C241	V269859570CE9	V274550040AAA	V294186182F79
V15110435B881	V21197578B67F	V260660783AB6	V26985958F41E	V274550051B23	V29418636F5B7
V151104368A1A	V21197579A7F6	V260660792B3F	V26985959E597	V2745500629B8	V29418640DD89
V151104379B93	V21197580B9FF	V260660803536	V26985960523E	V274550073831	V294186924EE3
V151104386364	V21197581A876	V2606608124BF	V2698596143B7	V27455008C0C6	V29418702C327
V1511043972ED	V21197584FFDB	V260660821624	V26985962712C	V27455009D14F	V29418721C20C
V15110440A224	V21197585EE52	V2606608307AD	V2698596360A5	V274550105556	V2941562444F2
V151104428136	V21197586DCC9	V260660847312	V26985964141A	V2745501144DF	V29415641478F
V15110444E400	V2119758835B7	V26066085629B	V2702664874C2	V274550127644	V294156734EF5
V15110445F589	V21197591B1AE	V260660865000	V27026653D3C9	V2745501367CD	V2941580130F4
V15110446C712	V2119759392BC	V260660874189	V27026662E828	V274550141372	V29415868F9E5
V15110447D69B	V21197595F78A	V26066088B97E	V2698591982F7	V2745501502FB	V29416162EF6C
V151104482E6C	V21197596C511	V26066089A8F7	V269859357B2B	V2745501721E9	V294163536135
V15110450BBFC	V211975982C6F	V260660902CEE	V269858776585	V27455018D91E	V2941636079C6
V15110451AA75	V211975993DE6	V260660913D67	V269859265068	V27455019C897	V29416678D5EB
V1511045298EE	V21197600985B	V260660920FFC	V271862219631	V274550207F3E	V29416680DA6B
V151104538967	V2119760189D2	V260660931E75	V27186222A4AA	V274550216EB7	V29418559B6F4
V15110454FDD8	V21197603AAC0	V260660946ACA	V27186223B523	V274550225C2C	V294187086C7D
V15110455EC51	V21197605CFF6	V2606609649D8	V27186224C19C	V274550234DA5	V294156526CCC
V15110456DECA	V21197606FD6D	V260660975851	V27186225D015	V27455024391A	V2961905117EC
V15110457CF43	V21197607ECE4	V26066098A0A6	V27186226E28E	V274550252893	V296191046425
V1511045837B4	V211976081413	V26066099B12F	V27186227F307	V274550261A08	V29620277107D
V15110459263D	V211976108183	V26066100A12A	V271862280BF0	V27455028F376	V296203135855
V151104609194	V21197611900A	V26066101B0A3	V271862291A79	V27455029E2FF	V296204920B19
V15110461801D	V21197613B318	V260661028238	V271862309E60	V2745503066E6	V29620504E3EB
V15110462B286	V21197614C7A7	V2606610393B1	V271862318FE9	V27455031776F	V2961907650E3

V15110463A30F	V212092154614	V26066104E70E	V26970342354D	V2745503245F4	V29620339C4BF
V15110464D7B0	V212092189DF1	V26066105F687	V2697034324C4	V27455033547D	V29619022687F
V15110465C639	V212092198C78	V26066106C41C	V26970344507B	V27455035314B	V297012245246
V15110467E52B	V212092212A58	V26066107D595	V2697034541F2	V2745503603D0	V29701380B3CE
V151104681DDC	V212092265EE7	V260661082D62	V269703467369	V274550371259	V29701404B72F
V151104690C55	V212092313380	V260661093CEB	V2697034762E0	V27455038EAAE	V29701426A78D
V15110470884C	V212092331092	V26066110B8F2	V269703489A17	V27455039FB27	V2970149571BE
V1511047199C5	V21209238AE41	V26066111A97B	V269703498B9E	V274550402BEE	V29701515E5A2
V15110472AB5E	V212092424C13	V260661129BE0	V269703500F87	V274550413A67	V297015391C7E
V15110473BAD7	V212092460A37	V260661138A69	V269703511E0E	V2745504208FC	V297016207703
V15110474CE68	V2120925255CB	V26066114FED6	V269703522C95	V274550431975	V2970164465F7
V15110475DFE1	V2120925430FD	V26066115EF5F	V269703533D1C	V274550446DCA	V2973585154B9
V15110476ED7A	V212092552174	V26066116DDC4	V2697035449A3	V274550457C43	V29735894AAB4
V15110477FCF3	V2120925613EF	V261548736236	V26970355582A	V274550464ED8	V29735928DEAC
V151104780404	V212092570266	V261548750700	V269703566AB1	V274550475F51	V297359362E0A
V15110479158D	V21209258FA91	V261548772412	V269703577B38	V27455048A7A6	V2973594117BD
V151104800B84	V212092704569	V26154879CD6C	V2697035883CF	V27455049B62F	V29735961240D
V151104811A0D	V21209272667B	V26154881C2EC	V269703599246	V274550503236	V29735969A845
V15110466FAA2	V2120927377F2	V26154882F077	V2697036025EF	V2745505123BF	V297359746A78
V150167501B29	V21209279D8A8	V26154908CB31	V269703613466	V274550521124	V29735979B19D
V150167757F34	V21209280C6A1	V26154909DAB8	V2697036206FD	V2745505300AD	V29701607300C
V150168031DCD	V21209282E5B3	V261549114F28	V269703631774	V274550547412	V2973590170DD
V1511040592E9	V212092848085	V261549127DB3	V2697036463CB	V27455055659B	V29829191C0FE
V15110424B0D0	V21209290DF79	V261549136C3A	V269703657242	V274550565700	V29829196B441
V15110431FEA5	V21209291CEF0	V261549141885	V2697036640D9	V274550574689	V298291994CB6
V15110441B3AD	V21209292FC6B	V26154915090C	V269703675150	V27454957C62C	V29829201F882
V150168013EDF	V21209294995D	V261549163B97	V26970368A9A7	V274549583EDB	V29829203DB90
V152394344A9E	V21209297ABC6	V261549172A1E	V26970369B82E	V27454967EC44	V2983520522D6
V152394355B17	V212092985331	V26154918D2E9	V269703703C37	V274549888EA3	V29835206104D
V15239436698C	V212093036026	V26154919C360	V269703712DBE	V274549899F2A	V29835209E8BA
V152394377805	V212093050510	V2615492074C9	V269703721F25	V274549967E05	V29835588BBF6
V1523943880F2	V212093072602	V261549216540	V269703730EAC	V274549976F8C	V298356330EE9
V15239439917B	V21209308DEF5	V2615492257DB	V269703747A13	V2745503420C2	V2988597364A2
V1523944041B2	V2120931379FE	V261549234652	V269703756B9A	V276796054410	V29886043F719
V15239441503B	V212093151CC8	V260660957B43	V269703765901	V276796076702	V29886065A19F
V1523944262A0	V212093173FDA	V2630726031C0	V269703774888	V276796089FF5	V298860842A06
V152394437329	V212093235396	V263072713991	V26970378B07F	V276796098E7C	V29886100F83E
V15239445161F	V211943393382	V263072720B0A	V26970380BFFF	V276796111BEC	V298861179559
V15239448CDFA	V21194340E34B	V263072746E3C	V26970381AE76	V2767961338FE	V29886195788B
V15239449DC73	V21194345B4E6	V26307283994B	V269703829CED	V276796144C41	V298861964A10
V15239450586A	V21194367A444	V26307285FC7D	V269703838D64	V276796166F53	V29886198A36E

V1523945149E3	V2119756646D9	V26307287DF6F	V26970385E852	V276796177EDA	V29959408876D
V152394527B78	V211975838B64	V26307294F42C	V26970386DAC9	V27679618862D	V299594274C2A
V152394536AF1	V21197590A027	V26307295E5A5	V26970387CB40	V2767961997A4	V29959452568F
V152394541E4E	V211975928335	V26307297C6B7	V2697038833B7	V276796213184	V29959496B90B
V152394550FC7	V21197597D498	V26307313148F	V26970390A627	V27679622031F	V29959497A882
V152394563D5C	V212040878C29	V2630731571B9	V26970391B7AE	V276796231296	V2995952173C0
V152394572CD5	V2120408874DE	V263073233EE7	V269703928535	V276796246629	V29959566601F
V15239458D422	V212040896557	V25624168DD40	V2697039394BC	V2767962577A0	V29959584D91D
V15267631209D	V21204091F0C7	V25624169CCC9	V26970394E003	V27679626453B	V2995958902F8
V152676321206	V21204093D3D5	V2562417048D0	V26970396C311	V27679629BDCC	V298861975B99
V15267633038F	V21204095B6E3	V256241715959	V26970397D298	V2767963039D5	V29959365845D
V152676347730	V212040968478	V256241726BC2	V269703982A6F	V27679631285C	V30018244248E6
V1526763566B9	V2120409795F1	V256241737A4B	V269703993BE6	V276796321AC7	V30018331689F
V152676365422	V212040986D06	V256241751F7D	V26970400FD3A	V276796330B4E	V300183520ED4
V1526763745AB	V212040997C8F	V256241762DE6	V26970402DE28	V276796347FF1	V300183710FFF
V15267638BD5C	V212041006C8A	V256241773C6F	V26970403CFA1	V276796356E78	V300183908466
V15267639ACD5	V212041017D03	V25624178C498	V26970404BB1E	V276796365CE3	V30018407ABC4
V152676407C1C	V212041024F98	V25624179D511	V26970405AA97	V27679606768B	V300184608BAB
V152676416D95	V212041035E11	V25624180CB18	V26970406980C	V276796100A65	V300184832320
V152676425FOE	V212041042AAE	V25624181DA91	V269704078985	V276796122977	V3001859271AD
V152676434E87	V212041053B27	V25624182E80A	V269704087172	V276796155DC8	V300186205973
V152676443A38	V2120410609BC	V263073244A58	V2697040960FB	V27679620200D	V304232780597
V152676452BB1	V212041071835	V26307333273F	V27186232BD72	V2767962754B2	V30423337C0DC
V15267646192A	V21204108E0C2	V263073354209	V27186233ACFB	V276796374D6A	V30423340F96B
V1526764708A3	V21204109F14B	V26307337611B	V27186234D844	V277813082D47	V30423341E8E2
V15267648F054	V212041107552	V263073398865	V27186235C9CD	V27781310B8D7	V30423345AEC6
V15267669D26D	V2120411164DB	V263073441E88	V27186236FB56	V27781311A95E	V304233478DD4
V152676705674	V212041125640	V263073463D9A	V271862381228	V277813129BC5	V30423361DB52
V1526767147FD	V2120411347C9	V263073472C13	V2718623903A1	V277813138A4C	V30423370D303
V152676727566	V2120411522FF	V263073635987	V27186240D368	V27781314FEF3	V304234199617
V152676741050	V212041161064	V263073642D38	V27186241C2E1	V27781315EF7A	V304234264488
V1526767501D9	V212041205F3A	V263073671FA3	V27186242F07A	V27781316DDE1	V304234506CB6
V152676763342	V212041227C28	V26307369F6DD	V27186243E1F3	V27781317CC68	V30428010A8A2
V1526767722CB	V212041236DA1	V26307377067B	V27186244954C	V27781318349F	V30428100EBA6
V15267678DA3C	V21204124191E	V26307378FE8C	V2718624584C5	V277813192516	V30428112D16C
V15267679CBB5	V212041250897	V264942044B4C	V27186246B65E	V277813218336	V30428128545E
V15267680D5BC	V212041263A0C	V264942055AC5	V27186247A7D7	V27781323A024	V30428174E08A
V15267681C435	V2120413046E2	V26494206685E	V271862485F20	V2778132092BF	V30428188A92E
V15267682F6AE	V21204131576B	V25624183F983	V271862494EA9	V27781322B1AD	V3042820227D0
V15267649E1DD	V2120413265F0	V256241848D3C	V27186250CAB0	V27781324D49B	V304322297D59
V15267651744D	V212041337479	V256241859CB5	V27186251DB39	V277813093CCE	V3043224386D3

V1526765246D6	V21204135114F	V25624186AE2E	V27186252E9A2	V27695579DA9C	V30432250AD90
V152676553269	V21204138CAAA	V25624187BFA7	V27186253F82B	V27695580C495	V3043228891A0
V15267659F805	V212041400BEA	V2562418956D9	V271862548C94	V27695581D51C	V304322988878
V152676604FAC	V2120414228F8	V25624190D2C0	V271862559D1D	V27695582E787	V30432303BB6F
V152676615E25	V212041433971	V25624191C349	V27186256AF86	V2769558482B1	V30432340EE94
V152676651801	V212041466EDC	V25624192F1D2	V27186257BE0F	V276955859338	V304323468BA2
V15267668C3E4	V212041477F55	V25624193E05B	V2718625846F8	V27695586A1A3	V30432350F74C
V152394440796	V2120414887A2	V2562419494E4	V271862595771	V27695587B02A	V30432353C5D7
V152394462484	V2120415103BB	V25624195856D	V27186260E0D8	V2769558848DD	V304324331D02
V1526767364EF	V212041523120	V25624196B7F6	V27186261F151	V276955895954	V30432438A3D1
V15267683E727	V2120415320A9	V25624197A67F	V27186262C3CA	V27695590DD4D	V30432443500A
V15239447350D	V21204157668D	V256241985E88	V26970379A1F6	V27695591CCC4	V304324859C9C
V156231876256	V212093217084	V256241994F01	V26970389223E	V27695592FE5F	V304325005F2D
V156231889AA1	V21209322421F	V25624200EABC	V26970412C7F0	V27695593EFD6	V304325235E06
V156231898B28	V21209328ED45	V25624201FB35	V26970413D679	V276955949B69	V304325307545
V156231900F31	V2120933078D5	V25624203D827	V26970414A2C6	V276955958AE0	V3043253701FA
V156231922C23	V212093334A4E	V26438616C97B	V26970415B34F	V27695596B87B	V30432593BAAE
V156231933DAA	V212093343EF1	V26438617D8F2	V2697041681D4	V27710894544A	V30432602935B
V156231944915	V212093352F78	V264386182005	V2697041868AA	V2771089545C3	V30432607C4F6
V15623195589C	V21209338F49D	V26438619318C	V269704197923	V277108967758	V304326494AE8
V156231966A07	V21209339E514	V264386208625	V26970420CE8A	V2771089766D1	V30432653FC6A
V156231977B8E	V212093412454	V2643862197AC	V26970421DF03	V277108989E26	V30432657BA4E
V15623202145F	V2120934473F9	V26438623B4BE	V26970422ED98	V277108998FAF	V30432700EA95
V1562320305D6	V212093474162	V26438624C001	V26970423FC11	V277109009FAA	V304327068FA3
V16241206E857	V21209348B995	V26438625D188	V2697042488AE	V277109018E23	V30432723EBBE
V1562320126C4	V21209349A81C	V264386280A6D	V269704259927	V27710902BCB8	V3043272944E4
V162643290113	V212093513D8C	V264386291BE4	V26970426ABBC	V27710903AD31	V30432730C0FD
V16264330850A	V212093546A21	V264386309FFD	V26970427BA35	V27710904D98E	V30432752B73F
V162643319483	V212093564933	V264386318E74	V26970429534B	V27710905C807	V30432775F030
V16264332A618	V212093699BAC	V26438632BCEF	V26970430D752	V27710906FA9C	V3043279658BB
V16264333B791	V212093710E3C	V26438633AD66	V26970431C6DB	V27710907EB15	V30432842E420
V16264334C32E	V212093732D2E	V26438634D9D9	V27186237EADF	V2771090813E2	V30432846A204
V16264335D2A7	V212093745991	V26438635C850	V27186263D243	V27710909026B	V30432851CF63
V16264336E03C	V212093767A83	V26438636FACB	V27186264A6FC	V277109108672	V3043287799E5
V16264337F1B5	V212093798274	V26438637EB42	V27186265B775	V2771091197FB	V304233648CFF
V162643380942	V21209383AEE6	V2643863813B5	V2718626685EE	V27710912A560	V304233684693
V1626433918CB	V21209385CBD0	V26438640D2F5	V271862679467	V27710913B4E9	V304234524FA4
V16264340C802	V212093881035	V26438642F1E7	V271862686C90	V27710914C056	V30432497A656
V16264341D98B	V2120938901BC	V26438643E06E	V271862697D19	V27710915D1DF	V3043289166C3
V16264342EB10	V2120939085A5	V2643864494D1	V27186270F900	V27710917F2CD	V3043289703F5
V16264343FA99	V211943569FA5	V264386458558	V27186271E889	V277109180A3A	V304329197E97

V162643459FAF	V211943759E8E	V26438646B7C3	V27186272DA12	V277109191BB3	V304329248F1A
V16264346AD34	V211975533B1C	V26438647A64A	V27186273CB9B	V27710920AC1A	V30432935874B
V16264347BCBD	V211975829AED	V264386485EBD	V271862787548	V27710921BD93	V30432944DBCA
V1626434955C3	V21197602BB49	V264386494F34	V271862834853	V277109228F08	V3043295919F7
V16264350D1DA	V21197604DE7F	V26438650CB2D	V271862861FFE	V277109239E81	V304329628D4C
V16264351C053	V21204092C25C	V2649420779D7	V27186289E709	V27710924EA3E	V304330401D4B
V16264353E341	V2120411701ED	V264942088120	V271862917299	V27710925FBB7	V304330454AE6
V162643558677	V21204128D372	V2649420990A9	V2718629717AF	V27710926C92C	V304330489103
V16264356B4EC	V21204129C2FB	V2649421237A2	V27186299FED1	V27710927D8A5	V30433081A562
V16264357A565	V212041444DCE	V26494213262B	V27186303DC4F	V277109282052	V304331333804
V162643585D92	V212041455C47	V264942145294	V27186305B979	V2771092931DB	V3043313886D7
V162643594C1B	V212041545416	V26494215431D	V27186310F70C	V27710930B5C2	V3043316346BC
V16264360FBB2	V212041567704	V26494217600F	V27186311E685	V27710931A44B	V304331742BDB
V16264362D8A0	V212041589E7A	V2649421898F8	V27186315A0A1	V2771093296D0	V304331753A52
V16264363C929	V212041598FF3	V264942198971	V27186316923A	V277109338759	V304331978350
V16264364BD96	V21204160385A	V264942203ED8	V271863249B40	V27710935E26F	V30437205EAD2
V156231911EB8	V2120416129D3	V264942212F51	V27186326B852	V27710936D0F4	V304372280287
V162643448E26	V212041621B48	V264942221DCA	V27186327A9DB	V27710937C17D	V30437233A58C
V16264365AC1F	V212041630AC1	V264942230C43	V27186328512C	V27710938398A	V30437236F221
V1626435497FE	V212041647E7E	V2649422478FC	V27186333F627	V277109392803	V304372381B5F
V16264348444A	V212041656FF7	V264942256975	V271863359311	V27710940F8CA	V304372390AD6
V164897146132	V212041665D6C	V264942265BEE	V27186337B003	V27710941E943	V30437240DA1F
V1648971570BB	V212041674CE5	V264942274A67	V2718633848F4	V27710942DBD8	V30440538F0A7
V164897164220	V21204168B412	V26494228B290	V27186341983D	V27710943CA51	V30440579864E
V1648971753A9	V21204169A59B	V26494229A319	V271863581C24	V27710944BEEE	V304406029AF1
V16489718AB5E	V21209229A610	V264942302700	V27186361AB8D	V27710945AF67	V3044074195D6
V16489719BAD7	V21209296BA4F	V264942313689	V271863629916	V277109469DFC	V304407509D87
V164897200D7E	V21194362F3E9	V264942320412	V27186363889F	V277109478C75	V30440757E938
V164897211CF7	V211943748F07	V26494233159B	V27186368364C	V277109487482	V30440771BFBE
V164897222E6C	V2119756023EF	V264942346124	V2718636927C5	V27710949650B	V304409168FCA
V164897233FE5	V211975657442	V2649423570AD	V27186370A3DC	V27710950E112	V30440921D11D
V164897244B5A	V21197587CD40	V264942364236	V27186371B255	V27710952C200	V30440937ADF3
V164897255AD3	V21197589243E	V2649423753BF	V2718637280CE	V27710953D389	V30440944D260
V164897266848	V21197594E603	V26494238AB48	V271863802014	V27710954A736	V30441119AD44
V1648972779C1	V21197609059A	V26494239BAC1	V271863864522	V27710955B6BF	V30441129872C
V164897288136	V21197612A291	V264942406A08	V27186389BDD5	V277109568424	V304411462B0B
V1648972990BF	V21204090E14E	V264942417B81	V2718639039CC	V2771095795AD	V30441159CA24
V1648973014A6	V21204094A76A	V26494242491A	V271863956E61	V277109586D5A	V30443352F839
V16489731052F	V212041143376	V264942435893	V271863965CFA	V27710961DAF3	V304433687D0B
V1648973237B4	V21204118F91A	V264942442C2C	V271863974D73	V27710962E868	V304434031B0D
V16489733263D	V21204119E893	V264942453DA5	V27186399A40D	V277109659CD7	V30443740A192

V164897345282	V212041214EB3	V264942460F3E	V27186409FF10	V27710966AE4C	V30443747D52D
V16489735430B	V212041272B85	V264942471EB7	V271864107B09	V27710967BFC5	V30423267E4B8
V164897367190	V2120413400C6	V26438651DAA4	V271864116A80	V2771096956BB	V304330838670
V164897376019	V21204137325D	V26438652E83F	V271864170FB6	V27710973E039	V304331267671
V1648973898EE	V21204139DB23	V26438653F9B6	V2718642363FA	V277109749486	V304331404797
V1648974059AE	V212041411A63	V26438657BF92	V2718642506CC	V27710976B794	V304405919016
V164897414827	V21204149962B	V264386584765	V271864315930	V27710916E344	V304433842D77
V164897427ABC	V212041501232	V2643865956EC	V271864337A22	V27710934F3E6	V30443642D85C
V164897436B35	V21204155459F	V26438660E145	V271864351F14	V27710951F09B	V30443744E7B6
V164897441F8A	V212092442925	V26438661F0CC	V271864373C06	V27710963F9E1	V304440111587
V164897463C98	V212092534442	V26438662C257	V27186445521C	V277109684732	V3044414754D5
V164897472D11	V21209259EB18	V26438663D3DE	V27186447710E	V277109597CD3	V30432698EB19
V16489748D5E6	V21209267280E	V26438664A761	V2718644889F9	V277109648D5E	V30432955D39B
V16489749C46F	V2120929942B8	V26438665B6E8	V271864510DE0	V27710970D2A2	V3043308838A3
V164897504076	V21209318C72D	V264386668473	V271864554BC4	V27710971C32B	V164897540652
V1648975151FF	V21209320610D	V2643866795FA	V271864589021	V27710972F1B0	V21209386F94B
V164897526364	V21209358A04D	V264386686D0D	V26970384F9DB	V27710975850F	V26438670F89D
V1648975372ED	V212093776B0A	V264386697C84	V26970401ECB3	V27695583F60E	V27710960CB7A
V26970410E4E2	/	/	/	/	/

呼吸机（注册证编号：国械注进 20152541271），型号 OmniLab Advanced+，受影响设备序列号请见下表。

L16241334A055	L16264373CB55	L162416248030	L22559704FEB7	L22976680B90A	L29617474A576
L16241355E50C	L16264374BFEA	L1624162591B9	L22559705EF3E	L22976681A883	L296174907942
L162413583EE9	L16264375AE63	L16241632FCDE	L2273360990EE	L229766838B91	L29617510ED5E
L162413592F60	L162643769CF8	L16241633ED57	L22733611057E	L22976685EEA7	L29899479B353
L1624136098C9	L162643778D71	L16241630DFCC	L2273361237E5	L22976686DC3C	L298994839FC1
L162413618940	L16264379640F	L16241627B2AB	L22733613266C	L22976687CDB5	L29899621F41B
L16241362BBDB	L162643807A06	L162416284A5C	L2273361452D3	L229766883542	L29899631EDC3
L16241363AA52	L162643816B8F	L183876909C1C	L22733615435A	L2297669283C0	L29899639618B
L16241364DEED	L162643825914	L184349555626	L2273361671C1	L229766939249	L29899740EB9E
L16241365CF64	L16264383489D	L1843495664BD	L227336176048	L22976694E6F6	L2989974867D6
L16241366FDFD	L162643843C22	L184349577534	L2273361898BF	L22976695F77F	L29899767AC91
L16241367EC76	L162643852DAB	L184349588DC3	L227336198936	L22976696C5E4	L298998368967
L162413681481	L162643861F30	L184349599C4A	L227336203E9F	L22976697D46D	L29899841B0D0
L162413690508	L162643870EB9	L184349602BE3	L227336212F16	L229766982C9A	L29899845F6F4
L155941900825	L16264388F64E	L184349613A6A	L225598847AB0	L229766993D13	L298998855F54
L1559419119AC	L162643917257	L1843496208F1	L22559887482B	L229767002D16	L298999469EB3
L155941922B37	L16241357C61E	L184349631978	L22734005DB7A	L229767013C9F	L29899955B5F0

L155941933ABE	L162643787586	L184349646DC7	L22734006E9E1	L229767031F8D	L298999659F98
L155941944E01	L16264389E7C7	L184349657C4E	L22734007F868	L229767057ABB	L29899973E376
L155941977C9A	L1626439063DE	L184349664ED5	L227340091116	L22976708A15E	L298999827137
L15594198846D	L1626439240CC	L184349675F5C	L22734010950F	L22976684FF2E	L29899988DE6D
L1559419995E4	L162643935145	L18434968A7AB	L227340118486	L2297705594BD	L298999915A74
L162643668520	L1626439425FA	L18434969B622	L22734013A794	L229770584F58	L2989944227E8
L1626436794A9	L162643953473	L22559699A896	L22734014D32B	L229770595ED1	L102986670811
L162643686C5E	L16264398EF96	L22559700B893	L22734015C2A2	L29407436E216	L102986661998
L162643697DD7	L16264399FE1F	L22559701A91A	L22787767429C	L29407536B8CA	L2255988659A2
L16264371E847	L16264370F9CE	L225597029B81	L22734012B61D	L296173735DCG	L10298679F8B7
L16264372DADC	L16241623F48F	L225597038A08	L22976679A703	L29617393C7DC	L10298691EEEE

